
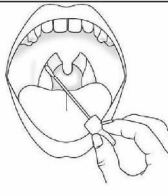


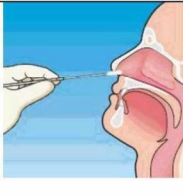

Afname instructie Aptima buis

Zelfafname respiratoire onderzoek (coronavirus); Aptima buis

1	2a	2b	
 k			
In de verpakking zit één Aptima buis (oranje) met één wattenstaafje. Haal het buisje met vloeistof en het wattenstaafje uit de verpakking.	Strijk het wattenstaafje eerst één keer langs de linker gehemelteboog / keelamandelen (naast de huig) en één keer langs de rechterboog.	Daarna (met hetzelfde wattenstaafje), breng het wattenstaafje door één neusgat (via de onderste neusgang) tot de nasopharynx (± 1/2 to 2/3)	Trek met een roterende beweging het wattenstaafje terug. NB. tranen/hoesten bij dit onderzoek is normaal. Enkele malen slikken voorkomt hoesten.
3	4		
			
Steek elk wattenstaafje in verschillende Aptima buizen na het maken van de uitstrijken tot op de bodem van de buis. Breek het kweekstokjes bij het rode streepje af.	Draai de dop goed op de buis.	Zorg dat uw naam, geslacht en geboortedatum op het buisje komen (sticker/stift).	

NB.

- De vloeistof blijft in de buis
- Was bij spatten de huid met water en zeep
- Spoel bij spatten in het oog met heel veel water