
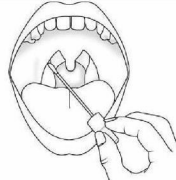
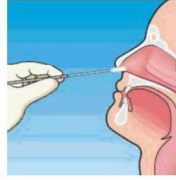


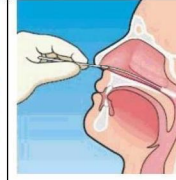

Afname instructie Transwab

Zelfafname respiratoire onderzoek (coronavirus); Transwab

1	2a	2b	
 In de verpakking zit één Transwab (paarse dop) met twee wattenstaafjes (dikke en dunne). Haal het buisje met vloeistof en wattenstaafjes uit de verpakking.	 Strijk het dikke wattenstaafje één keer langs de linker gehemelteboog / keelamandelen (naast de huig) en één keer langs de rechterboog.	 Breng het dunne wattenstaafje door één neusgat (via de onderste neusgang) tot de nasopharynx (± 1/2 to 2/3)	 Trek met een roterende beweging het dunne wattenstaafje terug. NB. tranen/hoesten bij dit onderzoek is normaal. Enkele malen slikken voorkomt hoesten.
3	4		
 Steek de twee wattenstaafjes na het maken van de uitstrijken tot op de bodem van de buis. Breek het kweekstokjes bij het rode streepje af.	 Draai de dop goed op de buis.	 Zorg dat uw naam, geslacht en geboortedatum op het buisje komen (sticker/stift).	

NB.

- De vloeistof blijft in de buis
- Was bij spatten de huid met water en zeep
- Spoel bij spatten in het oog met heel veel water