

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer	87382
Leverancier	Sairen Medical
Productnaam	onbekend
Datum	25-3-2020
Naam	5.1.2e
Functie	
Besproken met RIVM	<input type="radio"/> 5.1.2e <input type="radio"/> 5.1.2e
<b>Advies:</b> Type masker bij uitgifte: <i>Te gebruiken als spatscherm</i> <i>RIVM alcohol</i> <i>! Alkood: uitleveren</i>	

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief

Technical data sheet aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Oordeel van RIVM		

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	<i>Te gebruiken als spat masker (oog en gezichtsbescherming)</i>
----------------------------	--

VERPAKKING OM HET MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <i>nvt</i>
	Zo ja:	
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input type="radio"/> Gemakkelijk <input type="radio"/> Lastig <input type="radio"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="radio"/> Goed <input type="radio"/> Ruimte bij de kin <input type="radio"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="radio"/> Slechte aansluiting bij wangen
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="radio"/> Niet <input type="radio"/> Neus <input type="radio"/> Kin <input type="radio"/> Zijkant
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="radio"/> Masker blijft op zijn plek <input type="radio"/> Masker verschuift <input type="radio"/>

Bijzonderheden: