

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer	07304
Leverancier	onbekend chinees
Productnaam	Disposable medical mask
Datum	25-3-2020
Naam	5.1.2e
Functie	
Besproken met RIVM	<input type="radio"/> 5.1.2e <input type="radio"/> 5.1.2e
Advies:	ON HOLD; ALLEEN UITLEVEREN BIJ HOOG NOOD
Type masker bij uitgifte:	Type I Chirurgisch / niet mondmasker / spatbevestigd

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Oordeel van RIVM	Type aanduiding <u>onduidelijk</u>	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	Chirurgisch masker niet spatbevestigd. Type I ; <u>onduidelijk</u>
----------------------------	---

VERPAKKING OM HET MASKER			
1	Zit er verpakking om het masker?	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nee
	Zo ja:		
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input type="radio"/> Gemakkelijk <input type="radio"/> Lastig <input type="radio"/> Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee, het volgende wijkt af:	

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		<i>hvt nl. chimgisch</i>
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <i>hvt</i> <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden: