

Checklist N95 1860 facemask

Datum: 22-2-2020

Naam:

5.1.2e

Functie:

A+11 Tok is

~~Mr Dental Supplies~~  
~~Face mask~~

Mr Dental Supplies  
Face mask

Naam:

Functie:

Naam:

Functie:

Definitie steekproef:

- 3 vrachtwagens, per vrachtwagen het volgende controleren:
  - Min. 1 pallet per vrachtwagen of 3 random pallets in het magazijn
  - Per pallet: minimaal 3 om dozen openen en aantal binnendozen tellen
  - 1 binnendoos openen en beoordelen

|   | Aantal beoordelingen          |  |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Aantal pallets beoordeeld     |  |
| 2 | Aantal om dozen beoordeeld    |  |
| 3 | Aantal binnendozen beoordeeld |  |
| 4 | Aantal maskers beoordeeld     |  |

Ⓛ Chinese masker NIET SPAT BESTENDIG

Ⓛ ~~Chinese masker~~

• Hand tekening:

5.1.2e

• Datum: 23-03-2020.

- Inleg bon nr:

Voor de gehele partij geldt:

|    | Criteria gehele partij:  |  |
|----|--|--|
| 1  | Aantal pallets?  |  |
| 2  | Aantal omdozen per pallet  |  |
|    | Totaal aantal omdozen  |  |
| 3  | Aantal binnendozen per omdoos 1 in steekproef:   |  |
| 4  | Aantal binnendozen per omdoos 2 in steekproef:   |  |
| 5  | Aantal binnendozen per omdoos 3 in steekproef:   |  |
| 6  | Totaal aantal binnendozen (aantal pallets x aantal omdozen x aantal binnendozen per omdoos): |  |
| 7  | Totaal aantal maskers:   |  |
| 8  | Technical data sheet aanwezig?   |  |
| 9  | Garantiecertificaat aanwezig?  |  |
| 10 | Declaration of conformity aanwezig?  |  |
| 11 | Opslag condities (droog / nat / overdekt etc)<br>(opslag tussen -20°C en +30°C en < 80%RH)   |  |
| 12 | Temperatuur opslag geconditioneerd?  |  |

Oordeel:

Overige aanmerkingen:

Voor de afzonderlijke omdoos, binnendozen en maskers geldt:

|   | Criteria <b>OMDOOS:</b>   | Opmerking |
|---|---|-----------|
| 1 | Omdoos met 3M print, productsticker (type aanduiding, barcodering, lot no., zie foto in de bijlage) |           |
| 2 | Maat omdoos (lxbxh)   |           |
| 3 | Staan op de omdoos de volgende symbolen? (zie beneden)  |           |
| 4 | Maat binnendoos (lxbxh)   |           |
| 5 | Aantal omdoos per pallet  |           |
| 6 | Algemene indruk verpakking  |           |
| 8 | Algemene indruk omdoos (integriteit, vochtplekken etc)  |           |
| 9 | Aantal binnendozen per omdoos?  |           |

Oordeel:

Overige aanmerkingen:

| Criteria <b>BINNENDOOS:</b> |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| 1                           | Aantal maskers per binnendoos? Aantal vermelden:                      | 50         |
| 2                           | Algemene indruk binnendoos (integriteit, vochtplekken etc)            | Oa! netjes |
| 3                           | Staat de tekst '3M 1860' op de binnendoos?                            |            |
| 4                           | Is het logo 3M rood op de binnendoos?                                 |            |
| 5                           | Staat de tekst 'N95 respirator' op de binnendoos?                     |            |
| 6                           | Expiratie datum op <i>binnendoos</i> (shelf life max. 5 jaar) noteren |            |

Oordeel:

Overige aanmerkingen:


|   | Criteria MASKERS:   |  |
|---|---|--|
| 1 | Algemene indruk masker (integriteit, vochtplekken, geur etc)  |  |
| 2 | Teksten op voorzijde masker volgens 3M spec's (zie foto bijlage) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3M</li> <li>• 1860</li> <li>• NIOSH</li> <li>• N95</li> <li>• Lot no.....</li> <li>• TC 84 A 0006</li> <li>• Onder de rechthoek: HEALTH CARE PARTICULATE RESPIRATOR AND SURGICAL MASK</li> <li>• In kleine letters: For proper respirator use wearer must be trained and comply with the instructions on the box. For assistance see your supervisor or call 3M at 1-800-288-3957</li> <li>• Driehoek met uitroeptekens en tekst 'ATTENTION' eronder</li> </ul> |  |
| 3 | Staat op het <b>bovenste</b> elastiekje de tekst: 'For proper respirator use wearer must be trained and comply with the instructions on the box. For assistance see your supervisor or call 3M at 1-800-288-3957'   |  |
| 4 | Staat op het <b>bovenste</b> elastiekje de tekst: Driehoek met uitroeptekens en tekst 'ATTENTION' eraan   |  |
| 5 | Voorzijde masker: komt deze overeen met de foto in de bijlage?  |  |
| 6 | Gelaagdheid masker: komt deze overeen met de foto in de bijlage?  |  |
| 7 | Binnenkant masker: komt deze overeen met de foto in de bijlage?   |  |
| 8 | Materiaal soort (non woven)   |  |
| 9 | Aantal lagen?   |  |

Oordeel:


Overige aanmerkingen:

BIJLAGE 1: tekst op masker

CDC: ([https://www.cdc.gov/niosh/nppt/topics/respirators/disp\\_part/images/MarkingsPrint.jpg](https://www.cdc.gov/niosh/nppt/topics/respirators/disp_part/images/MarkingsPrint.jpg) en [https://www.cdc.gov/niosh/nppt/topics/respirators/disp\\_part/default.htm](https://www.cdc.gov/niosh/nppt/topics/respirators/disp_part/default.htm))

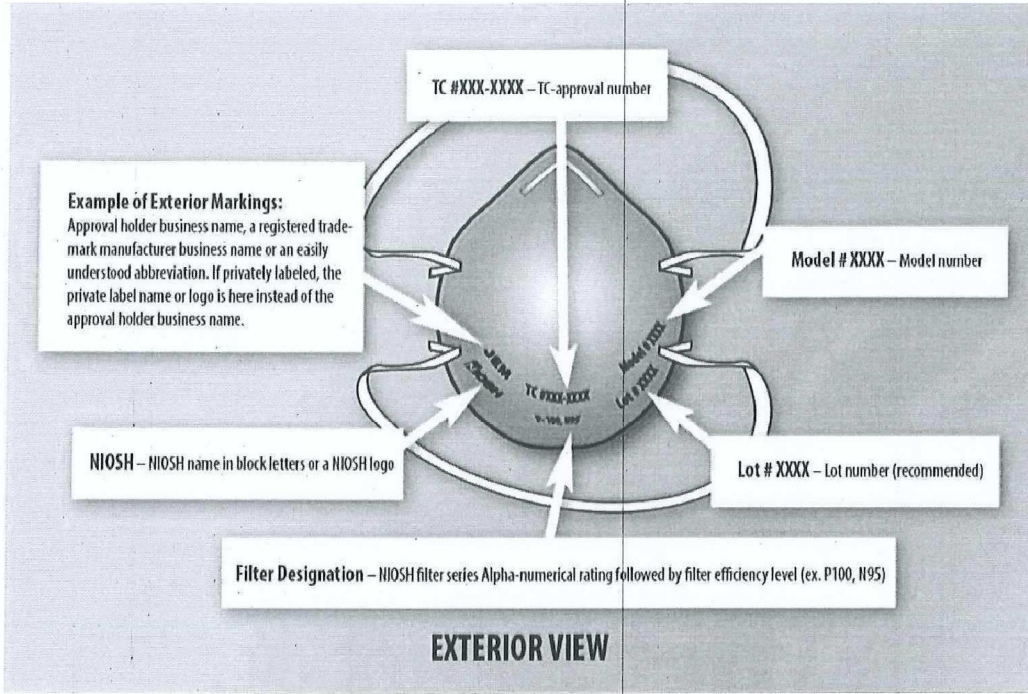


**BIJLAGE 2: Symbolen op verpakking + uitleg**

 Use by Date

Here are some additional symbols that you will see in the updated instructions for use.

 Date of Manufacture

 Manufacturer's Lot Number relevant to the device bearing the symbol

 Manufacturer

BIJLAGE 3: Foto opslag






BIJLAGE 4: Foto omdoos


**3M** **N95**

Health Care Particulate Respirator and Surgical Mask  
Respirateur contre les particules pour soins de santé  
et masque chirurgical  
Respirador para partículas y mascarilla quirúrgica para  
cuidado de la salud

**1860**

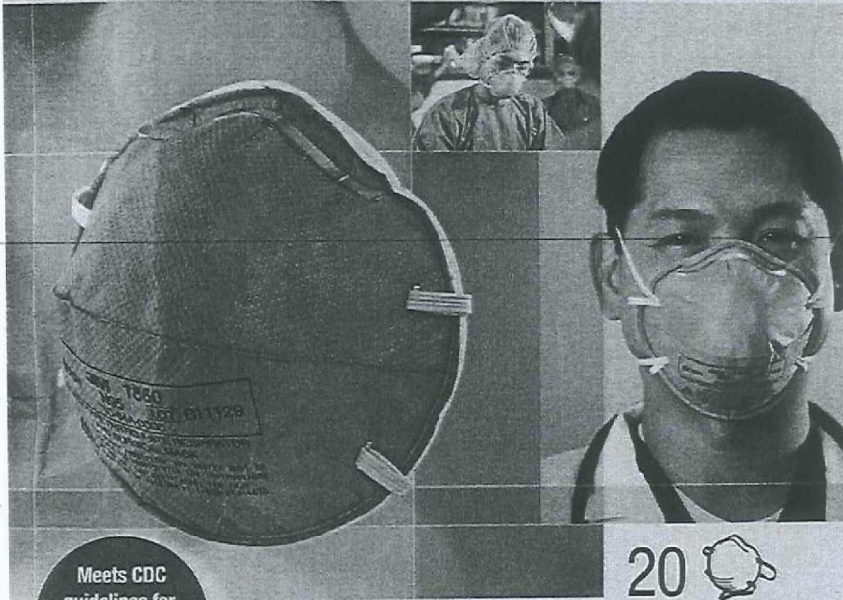

Meets CDC  
guidelines for  
*M. tuberculosis*  
exposure  
control

**20**   
contenido 20 respiradores

BIJLAGE 5: Foto voorzijde



BIJLAGE 6: Foto gelaagdheid



BIJLAGE 7: Foto binnenkant

