

- 20 dozen
- 2000 st/doos

Checklist N95 1860 facemask

Datum: 28-3-2020



Naam: [Redacted] 5.1.2e
Functie: [Redacted]

Naam:
Functie:

Naam:
Functie:

Definitie steekproef:

- 3 vrachtwagens, per vrachtwagen het volgende controleren:
 - Min. 1 pallet per vrachtwagen of 3 random pallets in het magazijn
 - Per pallet: minimaal 3 omdozen openen en aantal binnendozen tellen
 - 1 binnendoos openen en beoordelen

	Aantal beoordelingen	
1	Aantal pallets beoordeeld	
2	Aantal omdozen beoordeeld	
3	Aantal binnendozen beoordeeld	
4	Aantal maskers beoordeeld	

ORDEEL: ~~...~~ chirurgisch
mondmasker - NIET SPAT
BESTENDIG
~~...~~

Inslagbon nr - 87320

Handtekening: [Redacted] 5.1.2e

Datum: 28-3-2020

inswery met [Redacted] 5.1.2e
(RUM)

Voor de gehele partij geldt:

	Criteria gehele partij:	
1	Aantal pallets?	
2	Aantal omdozen per pallet	
	Totaal aantal omdozen	
3	Aantal binnendozen per omdoos 1 in steekproef:	
4	Aantal binnendozen per omdoos 2 in steekproef:	
5	Aantal binnendozen per omdoos 3 in steekproef:	
6	Totaal aantal binnendozen (aantal pallets x aantal omdozen x aantal binnendozen per omdoos):	
7	Totaal aantal maskers:	
8	Technical data sheet aanwezig?	
9	Garantiecertificaat aanwezig?	
10	Declaration of conformity aanwezig?	
11	Opslag condities (droog / nat / overdekt etc) (opslag tussen -20°C en +30°C en < 80%RH)	
12	Temperatuur opslag geconditioneerd?	

Oordeel:

Overige aanmerkingen:

Voor de afzonderlijke omdoos, binnendozen en maskers geldt:

	Criteria OMDOOS:	Opmerking
1	Omdoos met 3M print, productsticker (type aanduiding, barcodering, lot no., zie foto in de bijlage)	
2	Maat omdoos (lxbxh)	
3	Staan op de omdoos de volgende symbolen? (zie beneden)	NEEN
4	Maat binnendoos (lxbxh)	
5	Aantal omdoos per pallet	
6	Algemene indruk verpakking	
8	Algemene indruk omdoos (integriteit, vochtplekken etc)	
9	Aantal binnendozen per omdoos?	ZIE Lead book KODLWJG

Oordeel:

Overige aanmerkingen:

Criteria BINNENDOOS:		
1	Aantal maskers per binnendoos? Aantal vermelden:	100 st.
2	Algemene indruk binnendoos (integriteit, vochtplekken etc)	Geen aanmerkingen
3	Staat de tekst '3M 1860' op de binnendoos?	
4	Is het logo 3M rood op de binnendoos?	
5	Staat de tekst 'N95 respirator' op de binnendoos?	
6	Expiratie datum op binnendoos (shelf life max. 5 jaar) noteren	

Oordeel:

Alleen CE logo op binnendoos

Overige aanmerkingen:

Criteria MASKERS:		
1	Algemene indruk masker (integriteit, vochtplekken, geur etc)	
2	Teksten op voorzijde masker volgens 3M spec's (zie foto bijlage) <ul style="list-style-type: none"> • 3M • 1860 • NIOSH • N95 • Lot no..... • TC 84 A 0006 • Onder de rechthoek: HEALTH CARE PARTICULATE RESPIRATOR AND SURGICAL MASK • In kleine letters: For proper respirator use wearer must be trained and comply with the instructions on the box. For assistance see your supervisor or call 3M at 1-800-288-3957 • Driehoek met uitroeptekens en tekst 'ATTENTION' eronder 	Geen tekst op maskers
3	Staat op het <u>bovenste</u> elastiekje de tekst: 'For proper respirator use wearer must be trained and comply with the instructions on the box. For assistance see your supervisor or call 3M at 1-800-288-3957'	Straps, geen tekst vermeld.
4	Staat op het <u>bovenste</u> elastiekje de tekst: Driehoek met uitroeptekens en tekst 'ATTENTION' eraan	Neen, zie hierboven
5	Voorzijde masker: komt deze overeen met de foto in de bijlage?	
6	Gelaagdheid masker: komt deze overeen met de foto in de bijlage?	2 laag,
7	Binnenkant masker: komt deze overeen met de foto in de bijlage?	
8	Materiaal soort (non woven)	
9	Aantal lagen?	

Oordeel:

Geen EN noemer op het masker
 - Onduidelijkheid mbt type I of II noemer
 => OORDEEL TYPE I


Overige aanmerkingen:

website gecheckt


- chinees mondmasker teruggeworpen
 ↳ geen specs vermeld!

BUJLAGE 1: tekst op masker

CDC: https://www.cdc.gov/niosh/nppt/topics/respirators/disp_part/images/MarkingsPrint.jpg
https://www.cdc.gov/niosh/nppt/topics/respirators/disp_part/default.htm

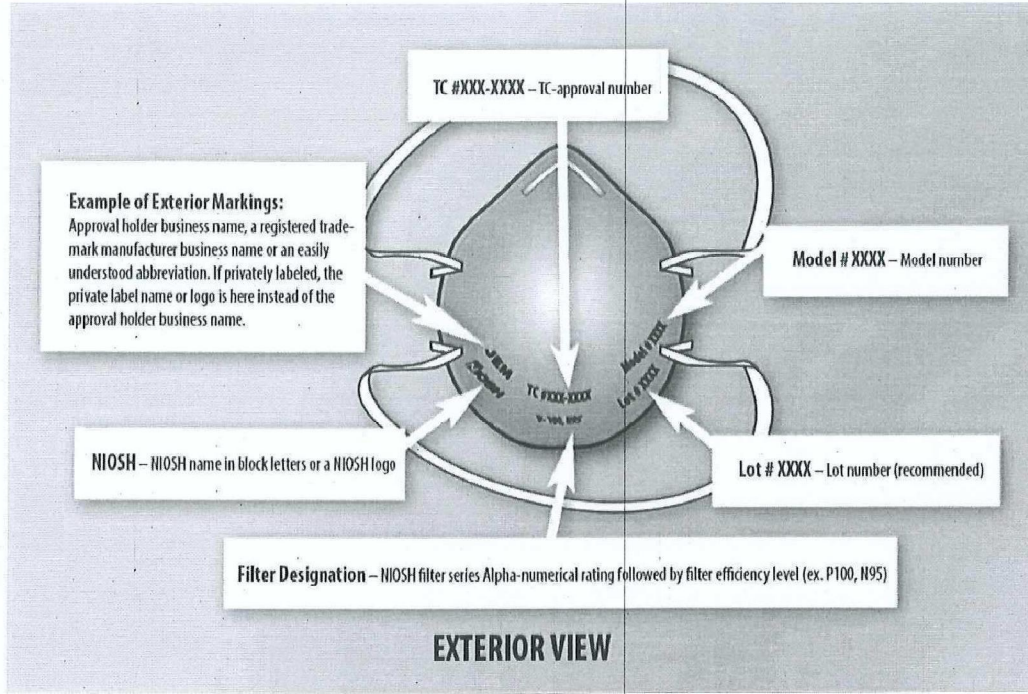


BIJLAGE 2: Symbolen op verpakking + uitleg

 Use by Date

Here are some additional symbols that you will see in the updated instructions for use.

 Date of Manufacture

 Manufacturer's Lot Number relevant to the device bearing the symbol

 Manufacturer


BIJLAGE 3: Foto opslag



BIJLAGE 6: Foto gelaagdheid



BIJLAGE 7: Foto binnenkant

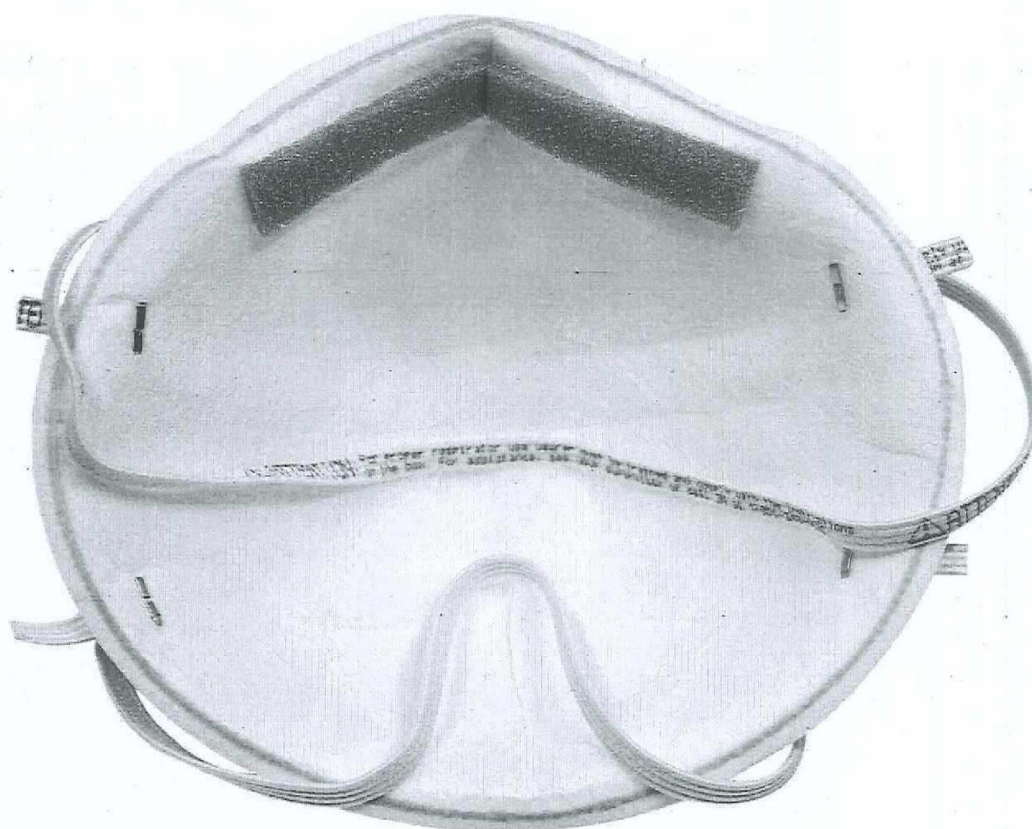

Loodsrapport van Koolwijk Op- & Overslag B.V.

Inslag Nr.: 87320 Dossier Nr.: 66847

Datum: 22-03-2020
 Klant: ERASMUS MEDISCH CENTRUM
 Autonr.: BH47ESB /
 Referentie: CAPGO 756-69341775

Goederen omschrijving: CHIRURGISCHE MONDKAPJES
 Aantal colli: 48000 PCS
 Aantal pallets: Hoeveelheid per pallet: -
 Bruto gewicht: 0 KG
 Containers:

Staat van de goederen: *goed*Aantal stuks met schade: */*

Schade:

Lot nr.:

Hout / Plastic / Euro pallet:

Prod. Datum:

Gelost door:

T.H.T.:

Geteid door:

Palletfactor:

Overige opmerkingen:

*2 pallets**20 dozen**24 dozen in een doos**100 stuks per doos*Gelost in vak/loods/stelling: *4 /*

Opmerkingen, voordat er gelost gaat worden:

20 dozen met 24 dozen per om doos en 100 stuks per doos

ATTENTIE CHAUFFEURS:**VOOR AANVANG VAN HET LOSSEN AAN DE RAMPEN 1 T/M 4
EERST EEN WIELKEG VOOR DE WIELEN LEGGEN !!!!!!!!!!!!!**

12 - 12

5.1.1c