

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer	07361	5.1.2e
Leverancier	Comforties	
Productnaam	comforties face mask-	
Datum	25-3-2020	
Naam	5.1.2e	
Functie		
Besproken met RIVM	<input type="radio"/>	5.1.2e
	<input checked="" type="radio"/>	5.1.2e
Advies:		
Type masker bij uitgifte:	Chirurgisch mondmasker type IIR, spat bestendig	

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nee
Oordeel van RIVM	Afwoord. type IIR.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	Chirurgisch masker IIR
--------------------------	------------------------

VERPAKKING OM HET MASKER			
1	Zit er verpakking om het masker? Zo ja:	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nee <i>onvt</i>
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input type="radio"/> Gemakkelijk <input type="radio"/> Lastig <input type="radio"/> Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee, het volgende wijkt af:	

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="radio"/> Goed <input type="radio"/> Ruimte bij de kin <input type="radio"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="radio"/> Slechte aansluiting bij wangen
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="radio"/> Niet <input type="radio"/> Neus <input type="radio"/> Kin <input type="radio"/> Zijkant
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee <i>banden zijn vrij lang.</i>
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="radio"/> Masker blijft op zijn plek <input type="radio"/> Masker verschuift <input type="radio"/>

Bijzonderheden:

Banden vrij lang.