

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

| | |
|--|----------------------------|
| Datum | 16-04-2020 |
| Inkoopnummer | 30574 |
| Lotnummer | 447 |
| Leverancier | 5.1.2I Procespositie Staat |
| Productnaam of naam fabrikant | Kindly Care Products |
| Productiedatum | april 2020 |
| Type mondmasker (volgens de fabrikant) | FFP2 |

| Q1 Particle Penetration | Testgemiddelde | Type P1/P2/P3 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 0,3 | 70% | — |
| 0,5 | 79% | — |

| Q2 Fit test | Zonder clip | Met clip |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Testpersoon 1 | / | |
| Testpersoon 2 | | |
| Testpersoon 3 | | |
| FFP2 | <input type="checkbox"/> FAIL | <input type="checkbox"/> PASS |

| Q3 en Q4 | + | +/- | - |
|-----------------------|---|-----|---|
| Oordeel RIVM | | | — |
| Oordeel AH/TOXI | | | — |
| Algemene bevindingen: | | | |

| | |
|--|------------------------|
| Quality Check: | Uitleg indien On Hold: |
| <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold | |
| Artikelnummer VWS | |
| Algemene bevindingen: | |

| Logistiek | Aankruisen | Classificatie | Clip (Ja/Nee) | Specs. | |
|-----------|-------------------------------------|--|---------------|-------------|--------------|
| | | | | PFE | FIT |
| Mand 1 | | Goedkeur: FFP2 | | >94% | >100 |
| Mand 2 | | Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT | | >94% | 33<FIT<100 |
| Mand 3 | | Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit | | 80%<PFE<94% | >100 |
| Mand 4 | | Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT | | 80%<PFE<94% | 33<FIT<100 |
| Mand 5 | | Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood | | >94% | <33 |
| Mand 6 | | Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood | | 80%<PFE<94% | <33 |
| Mand 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | Afkeur: Niet gebruiken | | < 80 | Ongeacht fit |

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

| | | | |
|--|------------|------------|------|
| Inkoopnummer | | LOT-nummer | 447. |
| Datum uitvoering check | 16-4-2020. | | |
| Leveringsdatum | | | |
| Leverancier | | | |
| Productnaam of naam fabrikant | | | |
| Productiedatum | 6-4-2020 | | |
| Naam | 5.1.2e | | |
| Functie | 5.1.2e | | |
| Besproken met RIVM | 5.1.2e | | |
| Advies: | | | |
| Type masker bij uitgifte: geen, afkeur. | | | |

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Technical data sheet aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Garantiecertificaat aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Declaration of conformity aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Oordeel van RIVM | afkeur. | |

Prestatie levering

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Oordeel arbeidshygiënisten | filtratie test: fail Afkeur. |
|----------------------------|---------------------------------|

| BINNENDOOS/PLASTICZAK | |
|-----------------------|--|
| 1 | Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 10 |
| 2 | Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl: |
| 3 | Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? Fillbration Respirator |
| 4 | Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? Kindly Care Products Co. |
| 5 | Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| 6 | Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen |
| 7 | Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt |
| 8 | Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t. |
| 9 | Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |

Bijzonderheden:

| VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER | |
|------------------------------------|---|
| 1 | Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| | Zo ja: |
| 2 | Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk |
| 3 | Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: |

Bijzonderheden:

| HET MASKER | |
|------------|---|
| 1 | Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: |
| 2 | Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: |
| 3 | Wat staat er op het masker: KN95 GB2626-2006 KN95 → opdrukken verschillen |
| | Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| | Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 4 | Is de stof is non woven? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| 5 | Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 |
| 6 | Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| 7 | Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes |
| 8 | Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v. |
| 9 | Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los |
| 10 | Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/> |

Bijzonderheden:

- verschillende grootte
- verschillende opdrukken.

| DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT | |
|--------------------------------------|--|
| 1 | Hoe past het masker op het gezicht? <input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/> |
| 2 | Waar ontsnapt lucht bij de leaktest <input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch) |
| 3 | Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 4 | Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/> |

Bijzonderheden:

Particle Penetration by Kalibra

| | |
|------------------|-------------|
| Datum | 16 apr 2020 |
| Inkoopnummer | 300571 |
| LOT /X /Z-nummer | LOT 447 |

| Q1 Particle Penetration | Gemiddelde rendement > 0,3 | Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3 | Gemiddelde rendement > 0,5 | Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3 |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Masker 1 | 62 | fail | 77 | fail |
| Masker 2 | 70 | fail | 81 | fail |
| Masker 3 | 71 | fail | 79 | fail |
| Totaal gemiddelde | 70 % | fail | 79 % | fail |

Eindoordeel > 0,3

fail

Eindoordeel > 0,5

fail

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

15-4-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

447

Aantal pallets

14

Totaal stuks

110000

Aantal per pallet

8000

Aantal per doos

1000

Aantal per verpakkingseenheid

10

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per

30

10

Artikelnummer:

971

Inkooporder nummer

300574

LCH-nummer

VWS 3057-2316 4-18

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

ingeboekt door:

Locatie:

019-126-01

152

2

Exemplaire pour destinataire LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
 Exemplaar voor geadresseerde VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
 Exemplar für Empfänger Empfänger FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR AVC 25 Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer No Nr

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)
 Absender (Name, Anschrift, Land)
 Procepositie Hasselaanweg 24
 Haerlogouard

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.
 NL 6537215
 Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.
 De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedepeoneerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)
 Empfänger (Name, Anschrift, Land)
 Centraal boekhuis
 Loosdrechtseweg 14
 Vianen

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land)
 Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
 Elmar transport
 globenet

3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)
 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder
 Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers

5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten
 Beigefügte Dokumente

6 Marques et numéros / Merken en nummers
 Kennzeichen und Nummern
 7 Nombre de colis / Aantal do's
 Anzahl der Packstücke
 8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking
 Art der Verpackung
 9 Nature de la marchandise / Aard der goederen
 Beschreibung des Gutes
 10 No statistique / Statistisch nummer / Statistisches nummer
 11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg
 12 Cubage m3 / Volume in m3
 Umfang in m3
 10 pallets
 5.1.2i Procepositie Staat
 VWS 3057-23164

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender
 Anweisungen des Absenders

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten
 Besondere Vereinbarungen
 A 15:00
 V 15:40

| 20 | Arrive heure / Aankomsttijd Ankunszeit | Depart heure / Vertrektijd Abfahrtszeit | Total heure / Totaaltijd Gesamzeit |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Adresse de chargement: Loadres: Ladeadresse: | | A V | 17:02 |

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift
 Frachtzahlungsanweisungen
 Franco / Frei
 Non franco / Niet franco / Unfrei

Adresse de déchargement:
Losadres:
Entladeadresse:

21 Etablie à / Opgemaakt te
 Ausgefertigt in le / de am

15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung

22 Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders

23 5.1.2e
 57-866-3
 15-4

24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen
 Gut empfangen
 Lieu / Plaats le / de 15-4-20
 5.1.2e

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

version 3.1 22/05/13 model IRU
 To be completed by the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

