

# Covid-19 Thuisstest


Dank u voor uw deelname!  
Door deelname aan dit onderzoek willen we onderzoeken of mensen zelf een COVID-19 sneltest kunnen uitvoeren en of deze de juiste uitslag geeft.

Uw testkit bevat de volgende onderdelen:




**1****Vorbereiding**

**1.1** Haal de sneltest uit de verpakking

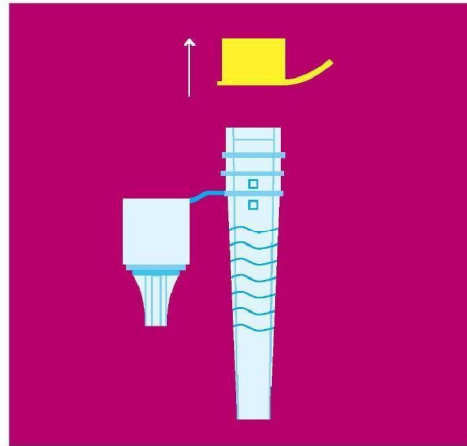

**1.2** Haal het dopje van het buisje met de vloeistof


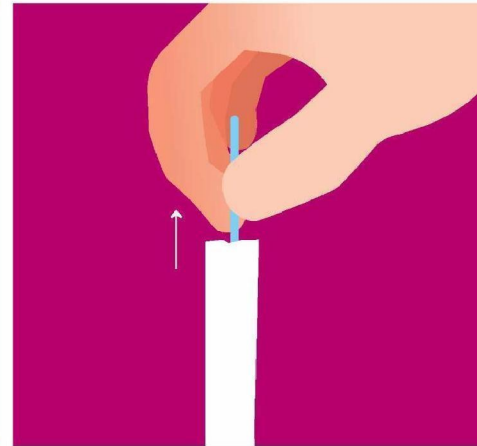


**1.3** Haal de wattenstaaf uit de verpakking


## 2

## Afname


Meet hier  
2,5 cm

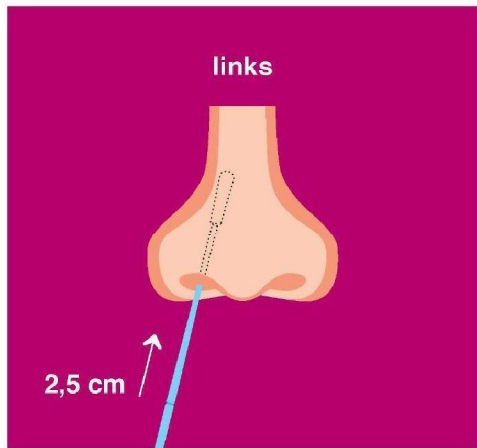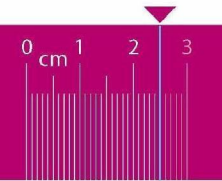

**2.1** Breng de wattenstaaf **2.5 cm** in de neus

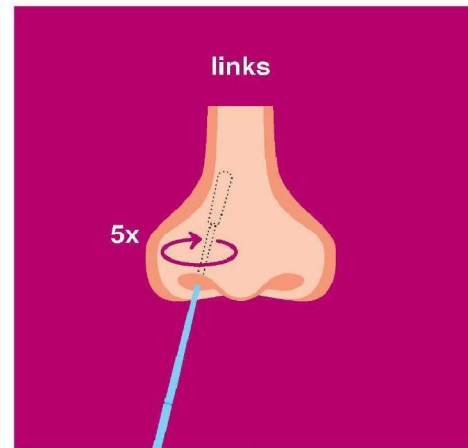

**2.2** Schraap 5 rondjes langs de binnenkant van de neus. Dit kan tranen in de ogen veroorzaken. Dat is heel normaal.

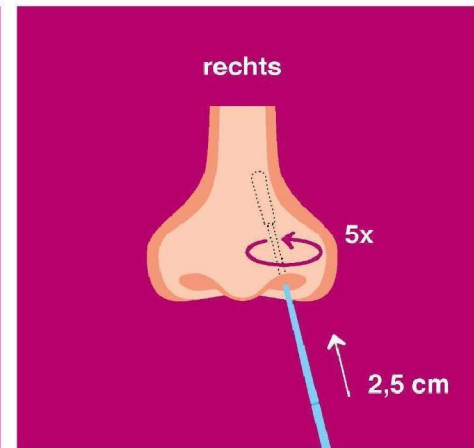

**2.3** **Herhaal** het schrapen met 5 rondjes in het andere neusgat

## 3

## Mengen



**3.1** Doop de wattenstaaf voorzichtig in de vloeistof




**3.2** Beweeg de wattenstaaf 15 seconden rustig rustig op en neer




**3.3** Knijp in de buitenkant van het buisje de vloeistof uit de wattenstaaf. Zo blijft alles in het buisje achter.

Het wattenstaafje mag weggegooid mag worden.

## 4 Druppelen

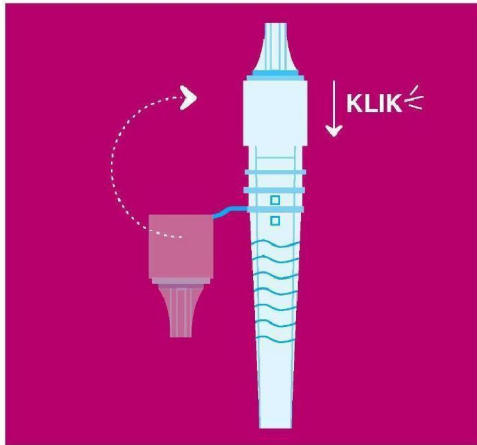

**4.1** Sluit het buisje af met de druppeldop tot je KLIK hoort

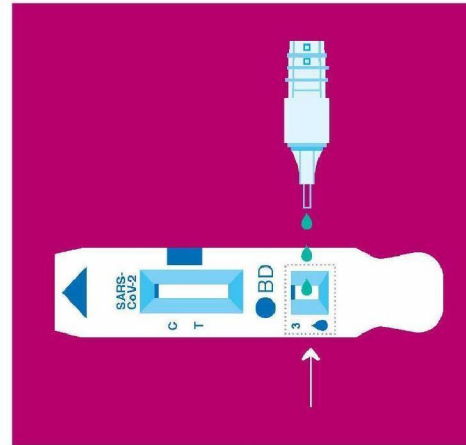

**4.2** Druppel 3 druppels op de snelst




**4.3** Zet een wekker op 15 minuten

## 5


**Wacht 15 minuten**

Wacht 15 minuten en lees de test af

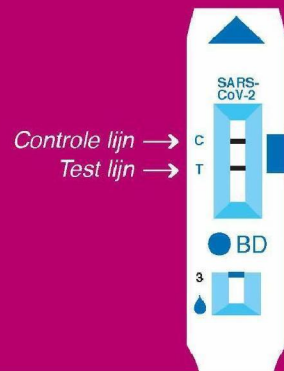**POSITIEF**


**5.1** Bij 2 streepjes is de uitslag **POSITIEF**

**5.2** U bent **waarschijnlijk** besmet met het Covid-19 virus

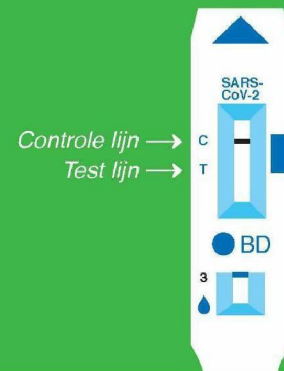**NEGATIEF**

**5.1** Bij 1 streepje bovenin is de uitslag **NEGATIEF**

**5.2** U bent **waarschijnlijk niet** besmet met het Covid-19 virus

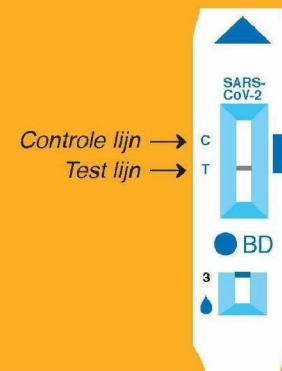**ONGELDIG**

**5.1** Bij maar 1 streepje onderin is de test **ONGELDIG**