

Beoordeling RYZUR KN95

Op de verpakking staat vermeld:

- Model KN95B. Onduidelijk waar de B voor staat. Op internet foto's van KN95B gevonden met Breathing valve. Het product bevat geen uitademingsventiel.
- Doos vermeldt 'not for medical use'.
- Geel waarschuwingpictogram op doos met tekst 'WARNING. The respirator helps reduce exposures to certain airborne contaminants, but cannot eliminate the risk of contracting infection, illness, or disease. Misuse may result in sickness or death. For some individuals with sensitive skin, the materials may cause allergic reactions if directly contacted with skin.'
- Lots bevatten twee typen maskers: een met neusbeugel niet zichtbaar (in het masker), een met neusbeugel wel zichtbaar (buitenkant van het masker). Het DEKRA rapport bevat alleen foto's van het masker met neusbeugel aan de buitenkant.

3417106.10-CPA.pdf: DEKRA rapportage:

- hierin wordt niet geheel getest volgens de 'CO-ORDINATION OF NOTIFIED BODIES PPE Regulation 2016/425 RECOMMENDATION FOR USE, PPE-R/02.075 Version 2';
 - de NaCl test wordt achterwege gelaten, er wordt alleen met parafine getest. Hiermee wordt afgeweken van de RFU.
 - Op de maskers staat niet vermeld: 'Filtering half mask to protect against COVID-19'
 - Expiratiedatum staat niet vermeld op de verpakkingendoos (prod. Datum wel: 13 juni 2020)
Lot 100.I395: expiratiedatum wel onder op de doos en in zakje dat om elk masker zit (AvD).
 - Typering masker staat niet gedrukt op het masker zelf
 - CO2 test is niet verricht
 - Bio compatibility is niet verricht
 - NB. het masker bevat geen uitademingsventiel bevatten en dit wordt ook niet als bezwaar gezien in het DEKRA rapport.
 - De foto's in het DEKRA rapport tonen een ander bijgevoegd quality check papiertje dan in het ontvangen product zit.
- NB. het HQTs inspection rapport geeft ook al aan dat er sprake is van twee verschillende producten in de lots

Conclusie: afkeur; masker niet geschikt voor medisch gebruik. Daarnaast beschermt het masker niet tegen infecties (volgens verpakking). DEKRA test wijkt af van RFU, deze is niet volledig gevolgd, waaronder ontbreken NaCl test. Lots bevatten twee typen maskers (verschil = neusbeugel wel/niet zichtbaar), het DEKRA testrapport gaat alleen uit van het type met zichtbare neusbeugel.