

20test™ Handleiding

NEDERLANDS

20test™ maakt testen op COVID-19 snel, gemakkelijk en pijnloos.
Onze test geeft binnen 15 minuten uitsluitel

Vragen? Chat met ons op 20test.com/nl of email ons op 5.1.2e@20test.com



1. Neem een neusmonster

Steek het wattenstaafje achterin een neusgat en draai deze 5 keer rond. Herhaal dit voor het andere neusgat.

Het nemen van een neus-monster zou pijnloos dienen te zijn.

Doe dit bij beide neusgaten zodat er genoeg weefsel op de wattenstaaf terecht komt.



2. Steek in de testkaart

Op de rechterzijde van de testkaart zie je 2 kleine openingen (A en B). Steek de wattenstaaf via opening B naar opening A.

Zorg dat de testkaart plat op tafel ligt.



3. Haal de plakstrip van de kaart af

Op de rechterzijde zit een plakstrip. Haal eerst voorzichtig de beschermlaag van de plakstrip af.

Haal eerst de beschermlaag van de plakstrip voordat u de 6 druppels toevoegt.



4. Druppel met testvloeistof

Breng 6 druppels testvloeistof aan op de wattenstaaf in opening A. Draai vervolgens de wattenstaaf 2 maal rond om zijn as.

Draai de wattenstaaf tweemaal om zijn as. Herhaal dit in de andere richting.



5. Vouw de testkaart dicht en wacht

Laat de wattenstaaf in opening A zitten en vouw de linkerkant van de testkaart over de rechterkant. Wacht vervolgens 15 min totdat het resultaat duidelijk zichtbaar is.

Zorg dat de testkaart altijd plat op tafel blijft liggen.

6. Je test resultaat

Positief
(+)



Negatief
(-)



Ongeldig






De eenvoudigste COVID-19 antigeen sneltest

Binnen 15 minuten weet je of je besmettelijk bent

- ✔ 96.9% nauwkeurigheid
- 🕒 Uitslag binnen 15 min
- 😊 Hoeft maar 2.5cm in de neus
- 👍 Makkelijk en pijnloos
- CE CE-gecertificeerd
- 😊 Duidelijk resultaat

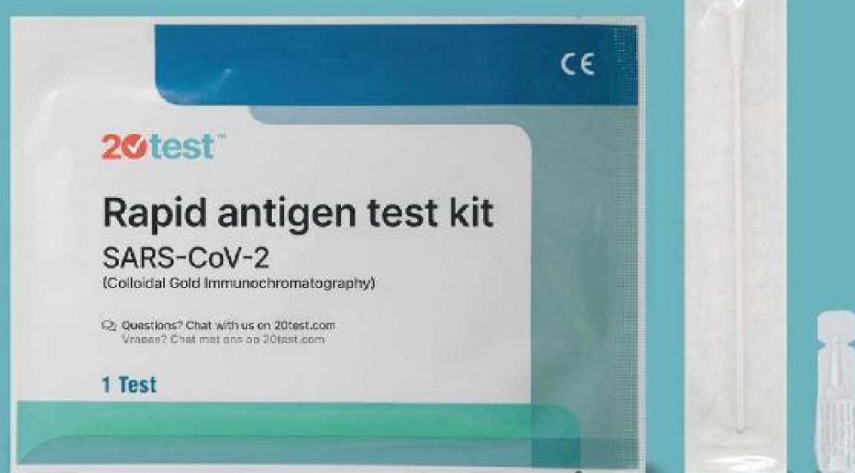

Geschikt in specifieke gevallen. Gebruik alleen in overeenstemming met de regels. In sommige landen toegestaan voor zelftesten (thuis). Anders onder toezicht van geregistreerde zorgprofessional. Volg nauwkeurig de instructies. Deze test meet besmettelijkheid. Negatieve testuitslag hoeft niet te betekenen dat persoon virus niet draagt. Volg daarom ook altijd alle andere maatregelen; afstand houden, ventileren en hygiëne voorschriften, ongeacht de testuitslag. Gebruik niet in hoog risico situatie (bijv. zorg). Meld positieve testuitslag aan de plaatselijke gezondheidsautoriteiten. Gebruik op eigen risico. Meer informatie en algemene voorwaarden zijn te vinden op 20test.com/legal.