

Geachte heer/ mevrouw,

Op verzoek van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) zullen wij (een deel van) uw coronatests uitvoeren. Om onze samenwerking zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, brengen wij u middels deze brief graag op de hoogte van wat u van ons mag verwachten en wat we van u nodig hebben om onze samenwerking tot een succes te maken.

Laboratorium

Eurofins Clinical Diagnostics Nederland in Rijswijk verzorgt alle afstemming, logistiek, afname sets en de medisch diagnostische ondersteuning. De laboratorium testen worden uitgevoerd door Eurofins Genomics in Duitsland.

De test die gebruikt wordt is CE-IVD gemarkeerd. De methodiek in het laboratorium in Duitsland maakt gebruik van de Molgen Pureprep Pathogen extraction reagent op de Kingfisher Flex gevolgd door een real-time RT-PCR m.b.v. ViroBoar RT-PCR kit (CE-IVD) op fr Roche LC 480 II thermal cycler. Primers en probes zijn gericht op het N1-gen CDC and E-gen WHO/Corman et al.

Het Eurofins Laboratorium is ISO17025 geaccrediteerd. De kwaliteit van de workflow van het laboratorium is door het RIVM goedgekeurd op basis van de behaalde testresultaten van de RIVM verificatie panels voor SARS-CoV-2 qPCR.

De Ct afkap waarde die gehanteerd wordt is volgens de test specificatie waarbij een Ct<39 als positief wordt gerapporteerd. Binnen de screenings setting wordt er geen bevestigings PCR uitgevoerd.

Afnamesets

Er worden door Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium (NMDL) voldoende afnamesets beschikbaar gesteld.

- De afnamesets bestaan uit een keelwab en nasopharynxwab, een buisje met blauw transport medium met monsternummer (103C *****) en een sealbag met absorptie viltje. De bewaartemperatuur voor de buizen is 15-25 C^o.
- Deze afnamematerialen worden door Eurofins NMDL geleverd aan de testlocaties.

Wij vragen u om materiaal van Eurofins goed gescheiden te houden van materiaal van andere laboratoria. Wij kunnen alleen de door ons bezorgde Eurofins materialen verwerken.



Stappenplan afnameproces

1. Scan het monsternummer in CoronIT
2. Afname van de voorgeschreven swab(s)
3. Plaats de swab(s) in het buisje met het transport medium
4. Breek de swabs op het afbreekpunt af en houdt ze in het buisje
5. **Draai de dop goed vast** op het buisje met daarin de swabs
6. Verpak elk sample in een **aparte sealbag** met absorptie viltje
7. Plaats de samples in de transportboxen van de koerier
8. De koerier haalt de samples op het afgesproken tijdstip op

CoronIT-storing

- Wanneer de situatie zich voordoet dat u de buizen niet kan inscannen in CoronIT vanwege een storing, willen we u vragen deze buizen apart te houden van de reeds gescande monsters.
- Wij verzoeken u om buizen die niet zijn ingescand in CoronIT, niet mee te geven aan de koerier.
- Het advies is om deze niet gescande buizen in een sealbag te stoppen samen met een kaartje met de volgende gegevens:
 - Monsternummer vermeld op de buis
 - BSN nummer, geslacht, emailadres, telefoonnummer, naam en geboortedatum cliënt
 - Datum afname
 - Locatie afname

Deze buizen kunnen dan door u op een later tijdstip alsnog in CoronIT worden ingescand.

Transport

- Eurofins NMDL zal met u de dagen en transporttijden van het ophalen van de samples afspreken.
- Wij zullen, indien nodig tweemaal daags transporten verzorgen.
- De samples worden op de GGD testlocatie(s) opgehaald en naar een centraal Eurofins verzamelpunt in Barneveld gebracht.
- Indien er wijzigingen in de dagen en transporttijden zijn, kunt u deze wijzigingen de middag tevoren, liefst vóór 16.00 communiceren per mail via onze logistieke customer service naar 5.1.2e@eurofins.com.
- Bij transportvragen op de dag zelf kunt u bellen naar [5.1.2e](tel:5.1.2e) 7 dagen per week van 8.00-20.00 bereikbaar.

Rapportage

- De testuitslagen worden gerapporteerd in CoronIT. (75% binnen 24 uur)
- Wanneer de testuitslag onbeoordeelbaar (indeterminate) is, wordt geadviseerd om bij aanhoudende klachten de cliënt opnieuw te laten testen.
- Heeft u vragen? Mail dan naar 5.1.2e@nmdl-lcpl.nl. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. Vermeld hierbij het monsternummer waar u vragen over heeft en het telefoonnummer waar wij u eventueel op kunnen terugbellen.



- Voor dringende vragen rondom testuitslagen kunt u 7 dagen per week van 8.00 tot 20.00 bellen op ons speciale corona support nummer 5.1.2e Dit telefoonnummer is ook beschikbaar voor intercollegiaal overleg.

Facturatie

- Eurofins heeft een overeenkomst met het ministerie van VWS, de facturatie zal direct verlopen met het ministerie. Eurofins factureert maandelijks op basis van de aantallen vanuit CoronIT. Hiervan kan wanneer u dat wenst een overzicht worden gestuurd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e Eurofins Clinical Diagnostics Benelux

5.1.2e

5.1.2e @eurofins.com

5.1.2e

