

Eindbeoordelingsformulier

Datum	1-11
Inkoopnummer	
Lotnummer	96
Leverancier	O2 Health
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	

	+	+/-	-	Voornaam beoordelaar
Oordeel RIVM			-	5.1.2e
Oordeel AH/TOXI		+/-		
Algemene bevindingen:				

	Testgemiddelde	Voornaam beoordelaar
Particle Penetration	37,9%	5.1.2e
Algemene bevindingen:		

Testen 1
Testen 2

	FF Pass Level		FFP2 (JA/NEEN)	Voornaam beoordelaar
	Zonder clip	Met clip		
Zonder clip	11	12		
Met clip	19	18	Nee	5.1.2e
Gemiddelde	nvt			

Versturen? (JA/NEEN)	Nee
Artikelnummer VWS:	
Algemene bevindingen: Voldoet niet, afgekeurd! Voldoet niet aan klasse PI	

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	100 96
Datum	1-4-2020		
Leverancier	O2 health		
Productnaam/naam fabrikant	Chinees-		
Productiedatum	?		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
Advies: Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	Redelijke maskers later we fittest afwachter.
--------------------------	--

is er niet

BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?		
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☐ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:	
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?		
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☐ Ja	☐ Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☐ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐ GB2626-2006 ☐ Anders:..... ☐ Geen	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☐ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt	
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☐ Ja	☐ Nee ☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	☐ Ja	☐ Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☒ Ja ☐ Nee
	Zo ja:	
2	Hoe is de verpakking te openen?	☒ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af: nvt.

Bijzonderheden:

Op de verpakking GB 2626-2006 KN95

HET MASKER						
1	Algemene indruk masker? ☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:					
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <i>Verpakkij.</i> ☒ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:					
3	Wat staat er op het masker: <i>KN 95</i>					
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <table border="1"> <tr> <td>☐ Ja</td> <td>☒ Nee</td> <td>☐ N.v.t.</td> </tr> </table> <i>op verpakking staat ook GB 2626-p06</i>	☐ Ja	☒ Nee	☐ N.v.t.		
☐ Ja	☒ Nee	☐ N.v.t.				
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <table border="1"> <tr> <td>☐ Ja</td> <td>☐ Nee</td> <td>☒ N.v.t.</td> </tr> </table>	☐ Ja	☐ Nee	☒ N.v.t.		
☐ Ja	☐ Nee	☒ N.v.t.				
4	Is de stof is non woven? ☒ Ja ☐ Nee					
5	Aantal lagen van het masker: <table border="1"> <tr> <td>☒ 1 <i>binne- wit</i></td> <td>☒ 2 <i>wol</i></td> <td>☒ 3 <i>melt wafel Baw</i></td> <td>☒ 4 <i>wit buite-</i></td> <td>☐ 5</td> </tr> </table>	☒ 1 <i>binne- wit</i>	☒ 2 <i>wol</i>	☒ 3 <i>melt wafel Baw</i>	☒ 4 <i>wit buite-</i>	☐ 5
☒ 1 <i>binne- wit</i>	☒ 2 <i>wol</i>	☒ 3 <i>melt wafel Baw</i>	☒ 4 <i>wit buite-</i>	☐ 5		
6	Heeft het masker een nare geur? ☐ Ja ☒ Nee					
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? ☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes					
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? ☒ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.					
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? ☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los					
10	Neusstuk ☒ Metaal in de stof ☐ Metaal aan de buitenlant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐					

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☒ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☒ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☐ Masker blijft op zijn plek ☒ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:

Fittest (norm = 100)

Datum:

Inkoopnummer	
Lotnummer	101 96
Productnaam	
Leverancier	O2 Health.
Type mondmasker	

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

		Score	
Gebruiker:		Zonder clip:	Met clip:
5.1.2e		11	12
5.1.2e		19	10 ⁰

Opmerkingen tijdens gebruik:

Algemeen: (ruim, krap, etc)	zonder punt prikt in nek	met dan
Verschuift bij Up & Down / Bending?		
Is één clip voldoende?		ja, vrij strak
Meer:		

Particle Penetration > 0,3 Mcron

Datum: 01 april 2020

Inkoopnummer	
Lotnummer	56
Productnaam	5
Leverancier	O2 Health
Type mondmasker	KN 95

	Gemiddelde rendement	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	32,2%	Fail
Masker 2	20,2%	Fail
Masker 3		
Totaal gemiddelde	37,9%	Fail

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet <u>niet</u> aan klasse P1

5.1.2e

5.1.2e

35/10/12

Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	NA	LOT-nummer	96
Datum	03/04/2020		
Productnaam	NA		
Leverancier	O2 Health		
Type mondmasker	KN 95		

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	49,1 %	fail for P1
Masker 2	68,9 %	fail for P1
Masker 3	66,9 %	fail for P1
Totaal gemiddelde	61,6 %	fail for P1

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet niet aan P1
5.1.2e

5.1.2e

95 %/min

Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	NA	LOT-nummer	96
Datum	03/09/2020		
Productnaam	NA		
Leverancier	O2 Health		
Type mondmasker	KN 95		

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	49,6 %	fail
Masker 2	67,8 %	fail
Masker 3	65,1 %	fail
Totaal gemiddelde	60,8 %	fail

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet niet aan P1
5.1.2e

5.1.2e

85 g/min

Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	NA	LOT-nummer	96
Datum	03/04/2020		
Productnaam	NA		
Leverancier	O2 Health		
Type mondmasker	KN 95		

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	50.6%	fail
Masker 2	49.3%	fail
Masker 3		
Totaal gemiddelde	50%	fail

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet niet aan P1
5.1.2e

5.1.2e

85 %

* Test was op al eerder geteste maskers wellicht daarom het grote verschil.

Besproken met 5.1.2e - worden 3 nieuwe maskers getest

5.1.2e

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

1-4-2020

Artikelnummer:

071

Lotnummer

96

Inkooporder nummer

39654

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

2

Totaal stuks

15 000

Aantal per pallet

Aantal per doos

Aantal per verpakkingseenheid

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle

Verpakt per

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:



Pakbon

Afleveradres:
Centraal Boekhuis
Laanakkerweg 14
4131 PB Vianen

Pakbonnummer
20200331

O2Health BV
Lindenlaan 18
1701 GV
Heerhugowaard
085-0185104
info@o2health.nl

Leverdatum: 30-03-2020
Bijzonderheden: Levering door O2 Health

Art	Omschrijving	VPE	Besteld	Geleverd	Nalevering
Art	Description	MPQ	Ordered	Delivered	Back log
KN95	Maskers KN95 – uit order van O2healh	Stuk	NA	96.000	0
5 pallets:					
6x doos a 2.000 stuks – 12.000 st					
8x doos a 1.500 stuks – 12.000 st					
18x doos a 1.500 stuks – 27.000 st					
15x doos a 1.500 stuks – 22.500 st					
15x doos a 1.500 stuks - 22.500 st					
Totaal = 96.000 st					

VERSCHILLENDE LOT NUMMERS: 31 MAR'20 11:47

94 97
95 98
96

Incoterms: incl. verzenden
Transport: DHL
Gewicht/weight:

Total boxes: 62
Total weight:
Handled by: 5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e @mindef.nl
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 18:16
Aan: 5.1.2e @slimstock.com; SupportVWS
CC: 5.1.2e @mindef.nl
Onderwerp: FW: overzicht leveringen vandaag o2 health

Ter info.

Dit betrof / betreft de twee te verwachten transporten van de firma O2.

Beide vrachten mondeling aangekondigd. Hierbij nog even de bevestiging per mail.

Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e (DHL NL) <5.1.2e@dhl.com>
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 14:37
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @cb.nl
CC: 5.1.2e <5.1.2e@googlemail.com>
Onderwerp: overzicht leveringen vandaag o2 health

Geachte 5.1.2e

Hierbij het gevraagde overzicht van de zending van O2 health BV

ETA in Vianen – 17:45
 Zending 1 – 100 dozen – MAWB 784 12792231
 Zending 2 - 13 dozen – MAWB 784- 1338 9666
 KN 95 maskers

Rond 19:00 is ETA
 Zending 3 – 52 dozen – MAWB 112 5893 2801
 Zending 4 – 52 dozen MAWB 784 – 1264 4623
 KN 95 maskers

Alvast bedankt

Kr

5.1.2e

5.1.2e – DHL Same Day

DHL Express (Netherlands) B.V.
 De Heldinnenlaan 205 2043 MB Utrecht

Tel 5.1.2e, Mobiel 5.1.2e
 5.1.2e@dhl.com
www.dhlexpress.nl

DHL Express – Excellence. Simply Delivered.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 1 april 2020 14:01
Pakbon

DEZE ZENDING IS VOOR HET
LANDELIJKE VERZAMELPUMP
VOOR MONDMASKERS VAN
HET MINISTERIE VAN VWS.
GEZIEN DE NOOD WILLEN WIJ
U VRAGEN DEZE ZENDEN MET
VOORRANG TE BEHANDELEN.
VOOR VRAGEN KUNT U
CONTACT OPNEMEN MET
[REDACTED] 5.1.2e
[REDACTED] 5.1.2e
[REDACTED] 5.1.2e VAN O2HEALH OP
[REDACTED] 5.1.2e OF [REDACTED] 5.1.2e
[REDACTED] 5.1.2e VAN VWS OP
[REDACTED] 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone