

Eindbeoordelingsformulier

Datum	1-11
Inkoopnummer	
Lotnummer	
Leverancier	02 Health
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	
Type mondkap (volgens de fabrikant)	

	+	+/-	-	Voornaam beoordelaar
Oordeel RIVM		-		
Oordeel AH/TOXI		-		
Algemene bevindingen:				
afwezig op <u>filtratie</u> en <u>fit</u>				

	Testgemiddelde	Voornaam beoordelaar
Particle Penetration	39,3%	
Algemene bevindingen:		

	FF Pass Level		FFP2 (JA/NEEN)	Voornaam beoordelaar
	Zonder clip	Met clip		
Zonder clip	1	10	nee	
Met clip	2	6		
Gemiddelde				

Versturen? (JA/NEEN)
nee
Artikelnummer VWS:
Algemene bevindingen:

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	98.
Datum	2-4-2020		
Leverancier			
Productnaam/naam fabrikant	Particulate matter Protective Mask.		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		
Advies: <u>Afkeur.</u> Type masker bij uitgifte: <u>geen.</u>			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM	Niet meegestuurd.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	afkeur, slechte fit en slecht filter.
--------------------------	---------------------------------------

BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	2 <i>geen binnendoos</i>	
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☐ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:	
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?		
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☐ Ja	☐ Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☐ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☒ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐ GB2626-2006 ☐ Anders:.... ☐ Geen	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos <i>verpakking masker</i> ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt	
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☒ Ja	☐ Nee ☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	☐ Ja	☒ Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☒ Ja ☐ Nee
	Zo ja:	
2	Hoe is de verpakking te openen?	☒ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af: 2

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☒ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☒ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☒ Neus ☒ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☐ Masker blijft op zijn plek ☒ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:

Fittest (norm = 100)

Datum:

Inkoopnummer	
Lotnummer	98
Productnaam	
Leverancier	
Type mondmasker	

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

	Score	
Gebruiker:	Zonder clip:	Met clip:
5.1.2e	10	17
5.1.2e	6	11

Opmerkingen tijdens gebruik:

	zonder	met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	strak rondom bij elastiek prijkt met puntje in nek	
Verschuift bij Up & Down / Bending?		.
Is één clip voldoende?		ja
Meer:		

5.1.2e

Van: 5.1.2e @mindef.nl
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 18:16
Aan: 5.1.2e @slimstock.com; SupportVWS
CC: 5.1.2e @mindef.nl
Onderwerp: FW: overzicht leveringen vandaag o2 health

Ter info.

Dit betrof / betreft de twee te verwachten transporten van de firma O2.

Beide vrachten mondeling aangekondigd. Hierbij nog even de bevestiging per mail.

Gr, 5.1.2e

Van: 5.1.2e (DHL NL) <5.1.2e@dhl.com>
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 14:37
Aan: 5.1.2e JD, LKOL, CLAS/ST CLAS/DIR M&D/AFD MAT/MLO&PROCMT <5.1.2e@mindef.nl>; 5.1.2e @cb.nl
CC: 5.1.2e <5.1.2e@googlemail.com>
Onderwerp: overzicht leveringen vandaag o2 health

Geachte heer 5.1.2e

Hierbij het gevraagde overzicht van de zending van O2 health BV

ETA in Vianen – 17:45

Zending 1 – 100 dozen – MAWB 784 12792231

Zending 2 - 13 dozen – MAWB 784- 1338 9666

KN 95 maskers

Rond 19:00 is ETA

Zending 3 – 52 dozen – MAWB 112 5893 2801

Zending 4 – 52 dozen MAWB 784 – 1264 4623

KN 95 maskers

Alvast bedankt

Kr

5.1.2e

5.1.2e – DHL Same Day

DHL Express (Netherlands) B.V.
 De Heldinnenlaan 205 2043 MB Utrecht

Tel 5.1.2e Mobiel 5.1.2e
 5.1.2e @dhl.com
www.dhlexpress.nl

DHL Express – Excellence. Simply Delivered.

Pakbon

Afleveradres:
Centraal Boekhuis
Laanakerweg 14
4131 PB Vianen

Leverdatum: 30-03-2020
Bijzonderheden: Levering door O2 Health

Pakbonnummer
20200331



O2Health BV
Lindenlaan 18
1701 GV
Heerhugowaard
085-0185104
info@o2health.nl

Art Art	Omschrijving Description	VPE MPQ	Besteld Ordered	Geleverd Delivered	Nalevering Back log
KN95	Maskers KN95 – uit order van O2health	Stuk	NA	96.000	0
	5 pallets:				
	6x doos a 2.000 stuks – 12.000 st				
	8x doos a 1.500 stuks – 12.000 st				
	18x doos a 1.500 stuks – 27.000 st				
	15x doos a 1.500 stuks – 22.500 st				
	15x doos a 1.500 stuks – 22.500 st				
	Totaal = 96.000 st				

VERSCHILLENDE LGT NUMMERS: 31 MAR '20 11:47

94 97
95 98
96

Incoterms: incl. verzenden
Transport: DHL
Gewicht/weight:

Total boxes: 62
Total weight:
Handled by:

5.12e

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 1 april 2020 14:01
Pakbon

DEZE ZENDING IS VOOR HET
LANDELIJKE VERZAMELPUMP
VOOR MONDMASKERS VAN
HET MINISTERIE VAN VWS.
GEZIEN DE NOOD WILLEN WIJ
U VRAGEN DEZE ZENDEN MET
VOORRANG TE BEHANDELEN.
VOOR VRAGEN KUNT U
CONTACT OPNEMEN MET

5.1.2e

5.1.2e

VAN O2HEALH OP

5.1.2e

OF

5.1.2e

5.1.2e

VAN VWS OP

5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

01-04-2020

Artikelnummer:

Lotnummer

98

Inkooporder nummer

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

4

Totaal stuks

70500

Aantal per pallet

18000

Aantal per doos

1500

Aantal per verpakkingseenheid

1

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per5
1

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Particle Penetration > 0,3 Micron

Datum: 01 april 2020

Inkoopnummer	—
Lotnummer	90
Productnaam	—
Leverancier	02 Health
Type mondkap	KN 95

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	23,5%	Fail
Masker 2	55,1%	Fail
Masker 3	—	—
Totaal gemiddelde	29,3%	Fail

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voltoet <u>niet</u> aan klasse P1

5.1.2e