

## Eindbeoordeling - Ready to Go

Datum:

Inkoopnummer	39335
Lotnummer	14
Productnaam	Tongjian
Leverancier	Tongjian 3D foldable disposable mask
Type mondmasker	KN95

	+	+/-	-	Naam beoordelaar
Oordeel RIVM			-	5.1.2e
Oordeel AH/TOXI	+			

	Testgemiddelde	Naam beoordelaar
Particle Penetration	65.7% CPI	5.1.2e

	FF Pass Level	FFP2 (JA/NEEN)	Naam beoordelaar
Fittest		Nee	

Onze beoordeling type mondmasker
Afkeuren voor FFP2 op basis van penetratietest en fittest zonder clip. VWS 958

Ready to GO (JA/NEEN)
Nee, filtertest voldoet niet. niet voor FFP2 VWS 958

## Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer of Gift-nummer	39335	Lotnummer: 14
Leverancier	Tong Lian	
Productnaam	3D Folding disposable mask	
Datum	29 maart 2020	
Naam	<input type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e <input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e	
Functie	<input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e	
Besproken met RIVM	<input type="checkbox"/> 5.1.2e    X    5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e	
Advies:	<i>Wacht Afkemen voor FFP2 UVS 950</i> Type masker bij uitgifte: <i>op basis van penetratietest en fittest</i> <i>KN95</i>	

### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Onduidelijk voor mij of alles met de certificaten in orde is. <i>Geen documenten beschikbaar.</i>	

### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	Masker zit
----------------------------	------------

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	50
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	3D Folding disposable mask
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Tong Jian
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> Anders: GB 2626-2006 <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee, op los papiertje <b>productiedatum:</b> <b>2020-3-21</b>

**Bijzonderheden:**

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: Het zijn twee maskers in één verpakking.	
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:  De bevestiging van de elastieken ziet er anders uit op de doos. En de chinese dame draagt een masker zonder metalen neusstuk.

**Bijzonderheden:**

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:  Stiksel en neusstuk
3	Wat staat er op het masker: KN95
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 buiten <input checked="" type="checkbox"/> 2 Elektr <input checked="" type="checkbox"/> 3 Wollig <input checked="" type="checkbox"/> 4 Wollig <input checked="" type="checkbox"/> 5 Binnen
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> (schuim)rubber strip aan de binnenkant <input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden:**

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leakttest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden:**

Masker zit hoog op de neus. Kan hinder geven met spatbril.

**Prestatie levering**

Oordeel arbeidshygenisten	
---------------------------	--

<b>BINNENDOOS/PLASTICZAK</b>	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)
	<input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?
	<input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:..... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?
	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

**Bijzonderheden:**

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

**Bijzonderheden:**

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker:
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden:**

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden:**

**Fittest (norm = 100)**

Datum: 29/3/20

Inkoopnummer	39335
Lotnummer	14
Productnaam	
Leverancier	
Type mondmasker	

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	


klein masker

- naad bij de neus maakt neushaak lastig sluitend te maken
- bij openen wordt scheff het masker van de neus

terke setate

zonder clip

met clip

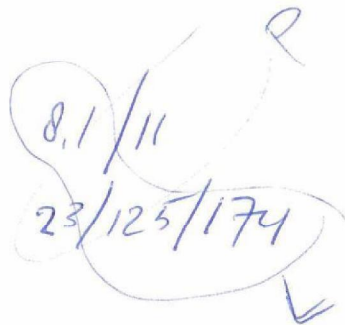

## Particle Penetration > 0,3 Mcron

Datum: 29/03/2020

Inkoopnummer	39 335
Lotnummer	14
Productnaam	
Leverancier	
Type mondmasker	KW 95

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	67,9 %	FAIL For P1
Masker 2	64,9 %	FAIL For P1
Masker 3	64,4 %	FAIL For P1
Totaal gemiddelde	65,7 %	FAIL For P1

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet niet aan P1

5.1.2e

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e

Datum: 26-03-2020

Artikelnummer: \_\_\_\_\_

Lotnummer: 14

Inkooporder nummer

39335

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

1

Totaal stuks

8950

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: \_\_\_\_\_

Paraaf: \_\_\_\_\_

Aantal afgehaald voor controle

50

Verpakt per

50

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

Bijzonderheden: