

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	26-4
Inkoopnummer	301115
Lotnummer	626
Leverancier	HAMA
Productnaam of naam fabrikant	JIANGXI HORNET INDUSTRIAL
Productiedatum	04-17-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	100%	P3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	31	96
Testpersoon 2	103	98
Testpersoon 3	55	57
FFP2	☐ FAIL	☒ PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
gse.	☒ Goedgekeurd ☐ Afkeur ☐ On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2	X	Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT	nee	>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	626
Datum uitvoering check	28-4-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	3D nano facial protectie mask		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		
Advies: Type masker bij uitgifte: FFP2 zonder clip-			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM	Geen prints op doos volgens de norm. Op masker wel CE en GB2616, maar geen fabrikant.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	verschil in grootte. fittest = gedaan met grote en kleine maskers.
--------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	25.	
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:	
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	3P Nano	
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Jiangxi Hornet.	
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☒ Ja ☐ Nee	
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☒ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☒ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW--) ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☒ GB2626-2006 ☐ Anders:.... ☐ Geen	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt	
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☒ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.	
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	☒ Ja ☐ Nee	

- andere doos dan normaal.

- Starbuss staat niet gecend.

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☒ Ja ☐ Nee
	Zo ja: <i>per. 5.</i>	
2	Hoe is de verpakking te openen?	☒ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☒ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? ☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? ☒ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af: <i>alleen neusclip = anders.</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>KN95 GB2626-2006.</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? ☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? ☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Is de stof is non woven? ☒ Ja ☐ Nee
5	Aantal lagen van het masker: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
6	Heeft het masker een nare geur? ☐ Ja ☒ Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? ☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? ☒ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? ☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk ☐ Metaal in de stof ☒ Metaal aan de buitenkant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐

Bijzonderheden:

*- weinig verschillen tussen maskers op het eerste gezicht
→ wel verschillen in grootte!*

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☒ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☐ Neus ☒ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☐ Masker blijft op zijn plek ☒ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:

Particle Penetration by Kalibra

Datum	28-04-2020.
Inkoopnummer	301115
LOT/X-nummer	626.

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	100 %	Pass for P3	100 %	Pass for P3
Masker 2	100 %	Pass for P3	100 %	Pass for P3
Masker 3	100 %	Pass for P3	100 %	Pass for P3
Totaal gemiddelde	100 %	Pass for P3	100 %	Pass for P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	104	< 240 Pa	Pass
Masker 2	165		Pass
Masker 3	111		Pass.

Eindoordeel > 0,3

Voldoet voor P3.

Eindoordeel > 0,5

Voldoet voor P3.

Fittest by RIVM

Datum	28-04-2020
LOT/X-nummer	626

Fit factor real time test < 10	☐ Ja, test alleen met Clip	☒ Nee, test zonder en met clip
--------------------------------	---	--

Tester:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	31	96
5.1.2e	103	98
5.1.2e	53	16 57

	Opmerkingen	
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	redelijk ruim	ok
Verschuift bij Up & Down/Bending?	een beetje	nee een beetje
Is één clip voldoende?		Ja
Extra opmerkingen		

Type FFP Masker	103
Fit test (FAIL of PASS)	

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

Tel. 085 - 27 34 999

1-15, 19 + 21 + 22

version 3.1 22/05/13 model IRU

CMR
concurrent.nl

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingetragenen Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

LETTRE DE VOTURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		CMR	AVC	25	Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer	No Nr	1353
1 (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Logistics (Netherlands) B.V. Care of: Halma Solutions BV Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands		Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. Indien de overeenkomstige plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.					
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land) Centraal Boekhuis Laanakkerweg 14 4131 PB Vianen The Netherlands		16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands					
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land) Laanakkerweg 14 4131 PB Vianen		17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)					
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) THE NETHERLANDS		18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers Dossier: 430/319378 Ref: REF 3057-23160					
5 Documents annexes / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente		19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.: 5.1.2e logistics Netherlands 5.1.2e					
6 Marques et numéros / Merken en nummers Kennzeichen und Nummern 999-76171012 TCG2004826AE		7 Nombre de colis / Aantal colli Anzahl der Packstücke 130		8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung CTNS Face Mask		11 Poids brut kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg 1138,000	
12 Cubage m3 / Volume in m3 Umfang in m3 13,61		2273 vol 26 APR '20 16:54					
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1).		20 Arrivé heure / Aankomsttijd Ankunftszeit Adresse de chargement: Loadres: Ladeadresse: Adresse de déchargement: Loadres: Entladeadresse:					
14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen ☐ Franco / Frei ☐ Non franco / Niet franco / Unfrei		15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung					
21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in Luchthaven Schiphol		22 Date / Datum 24/04/20					
23 Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands		24 Lieu / Plaats Ort Centraal Boekhuis BV Afd. Inkomende Goederen Get. door de afzender ontvangen palle 5.1.2e 5.1.2e					