

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	29-4-2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	650
Leverancier	
Productnaam of naam fabrikant	3D Nano Facial Protective Mask (Sterbus)
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	100%	P3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<10	101
Testpersoon 2	<10	34
Testpersoon 3		6
FFP2	☐ FAIL	☒ PASS met clip

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
950	☒ Goedgekeurd ☐ Afkeur ☐ On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2	X	Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT	Ja	>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

Particle Penetration by Kalibra

Datum	29 april 2020
Inkoopnummer	301276
LOT/X-nummer	650

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 2	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 3	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Totaal gemiddelde	100%	Pass P3	100%	Pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	115 Pa	< 240 Pa	Pass
Masker 2	133 Pa		Pass
Masker 3	160 Pa		Pass

Eindoordeel > 0,3

Voldoet FFP3

Eindoordeel > 0,5

Voldoet FFP3

Fittest by RIVM

Datum	29-4-20
LOT/X-nummer	650

Fit factor real time test < 10	☒ Ja, test alleen met Clip	☐ Nee, test zonder en met clip
--------------------------------	--	---

Tester:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	< 10	181
5.1.2e	< 10	34
5.1.2e		6

Opmerkingen		
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	Te groot, zit af	zit goed
Verschuift bij Up & Down/Bending?		nee
Is één clip voldoende?		Ja
Extra opmerkingen	Ademt fijn	

Type FFP Masker	FFP2 3-3%
Fit test (FAIL of PASS)	pass

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	650.
Datum uitvoering check	29-4-2020.		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	Starbuss 3D nano faciaal mask.		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		
Advies: Type masker bij uitgifte: FFP2 met clip.			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	FFP2 met clip. (andere lots van Starbuss Zonder clip goede fit → apart)
--------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	16
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	3D Nano Facial Protective Mask
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Sterbuss
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☐ Ja ☐ Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☒ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☒ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☒ GB2626-2006 ☐ Anders:.... ☐ Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☒ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	☐ Ja ☐ Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☒ Ja ☐ Nee
	Zo ja:	
2	Hoe is de verpakking te openen?	☒ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☒ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? ☐ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? ☐ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KNgt GB2626-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? ☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? ☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Is de stof is non woven? ☒ Ja ☐ Nee
5	Aantal lagen van het masker: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5
6	Heeft het masker een nare geur? ☐ Ja ☒ Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? ☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? ☒ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? ☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk ☐ Metaal in de stof ☒ Metaal aan de buitenkant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐

Bijzonderheden:

alleen kleine verschillen tussen de maskers in dit lot.

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☒ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☐ Neus ☒ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☐ Masker blijft op zijn plek ☒ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e

Datum: 20-4-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer 650

Aantal pallets 19

Totaal stuks 107712

Aantal samples 40

Totaal aantal na samples 107664

Aantal per pallet 5760

Aantal per doos 576

Aantal per verpakkingseenheid 76

ook: Xorg??

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: _____

Paraaf: _____

Artikelnummer: 958

Inkooporder nummer 301276

LCH-nummer

305723160 - STA01

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

5.1.2h

ingeboekt door:

2

Exemplaire pour destinataire
Exemplaar voor geadresseerde
Lettre de voiture - Document de transport
VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR

AVC

25 Code transporteur
Vervoerderscode
Code Frachtführer
No
Nr

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)
MOL Logistics (Netherlands) B.V.
Care of: Halma Solutions BV
Shannonweg 11
1118 LA Luchthaven Schiphol
The Netherlands

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.



NL

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.
De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponceerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)
Empfänger (Name, Anschrift, Land)

Centraal Boekhuis
Laanakkerweg 14
4131 PB Vianen
The Netherlands

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land)
Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

Schiphol Express
Shannonweg 11
1118 LA Luchthaven Schiphol
The Netherlands

3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)

Laanakkerweg 14
4131 PB Vianen

NL

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)
Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

5.1.2e

H00700000 NL

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)

THE NETHERLANDS

24/04/20

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder
Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers

337472

Dossier: 430/319375
Ref: REF 3057-23160

6 Marques et numéros / Merken en nummers
Kennzeichen und Nummern

784-13663635
TCG2004830AE

7 Nombre de colis / Aantal coli
Anzahl der Packstücke

167

8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking
Art der Verpackung

CTNS
Face Mask

9 Nature de la marchandise / Aard der goederen
Bezeichnung des Gutes

10 No statistique / Statistisch
nummer / Statistischer
nummer

11 Poids brut, kg / Bruto gewicht
in kg / Bruttogewicht in kg

1299,000

12 Cubage m3 / Volume in m3
Umfang in m3

17,47

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl
Tel. 085 - 27 34 999

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De ditte omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingekreisten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

1-15, 19 + 21 + 22

LEVERANCIER: HALMA SOLUTIONS
PRODUCT CODE: X019 STARBUSS
VERPLICHTINGENNUMMER: 3057-23160
QUANTITY IN PIECES: 96192 PCS
QUANTITY IN CARTON: 167 CTNS

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender
Anweisungen des Absenders

The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1).

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten
Besondere Vereinbarungen

In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.:
MOL Logistics Netherlands

5.1.2e

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift
Frachttzahlungsanweisungen

☐ Franco / Frei

☐ Non franco / Niet franco / Unfrei

21 Etablie à / Opgemaakt te
Ausgefertigt in

le / de
am

Luchthaven Schiphol 24/04/20

15 Remboursement / Remboursement / Rückerstattung

22

5.1.2e Logi
Care of: ons B
Shannonw
1118 LA Schip
The Neth

23

Schiphol Express
Shannonweg 11
1118 LA Luchthaven Schiphol
The Netherlands

24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen
Gut empfangen

Lieu / Place
Ort
Vianen
28-04-20
Erasmusweg 10
4104 AK Culemborg
Tel. 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

CMR
concurrent.nl

version 3.1 22/05/13 model IRU

To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders