

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	2-5
Inkoopnummer	301436
Lotnummer	093
Leverancier	g
Productnaam of naam fabrikant	Star-buss
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	g58

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	100%	F3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	spof 6,8 fgn <10	spof 7,2 fgn 5
Testpersoon 2	<10	7,0
Testpersoon 3	<10	7,0
FFP2	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen:	Fittest onvolledige; Versluitende mechanisme in zachtgedrukt. Formaat, randafwerking. Richt u op een afbeelding voor.		

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	ja	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

Particle Penetration by Kalibra

Datum	4 mei 2020
Inkoopnummer	301436
LOT/X-nummer	693

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 2	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 3	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Totaal gemiddelde	100%	Pass P3	100%	Pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	123 Pa	< 240 Pa	Pass
Masker 2	81 Pa		Pass
Masker 3	104 Pa		Pass


Eindoordeel > 0,3
Voldoet aan FFP3
Eindoordeel > 0,5
Voldoet aan FFP3

Fittest by RIVM

Datum	4-5-2020
LOT/X-nummer	693

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input checked="" type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	---

		Zonder clip of kam		Met clip of kam	
Tester:	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score	
1	5.1.2e	snuf	68		72
2	5.1.2e	fn	< 10		9
3	5.1.2e	grof	10		10
4	5.1.2e	grof	< 10		70
Algemeen: (ruim, krap, etc)					
Verschuift bij Up & Down/Bending?					JA
					Is één clip voldoende?
					JA

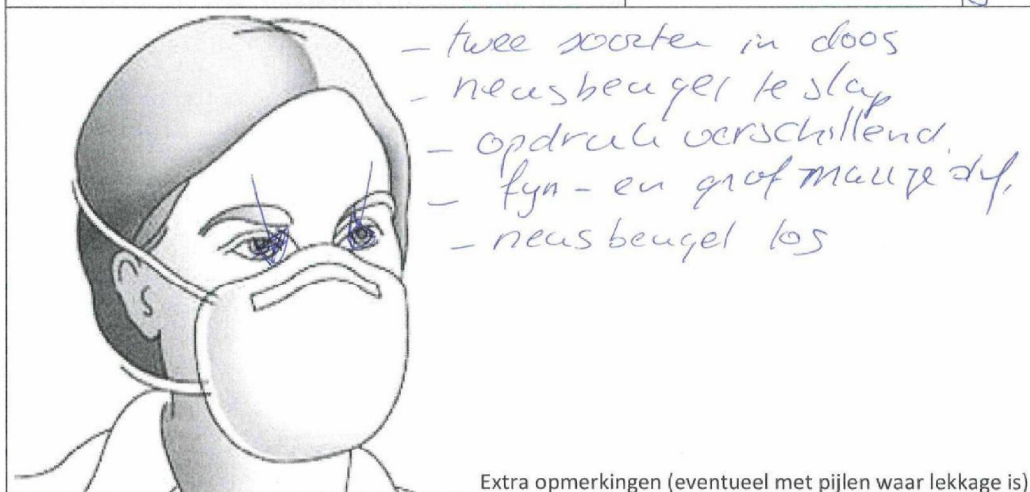

Type FFP Masker	FFP2
Fit test (FAIL of PASS)	fail

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	693
Datum uitvoering check	4/5/2020		
Leveringsdatum	4/5		
Leverancier	Starbuss		
Productnaam of naam fabrikant	3D Nano facial protective mask		
Productiedatum	22/04/2020		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
Advies:			
Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	<p>Stidtest onvoldoende. Versluitende maskers in 1 zakje en in dozen. Verschil in formaat randmaskering etc. Nieuwklein & laag in afwijking van afbeelding op verpakking.</p>
--------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>16</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde, <i>mark</i> <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>- verschillende maskers in 1 zakje (zie foto)</i> <i>- randmaskering rondtuit 3 fije laagjes versus</i> <i>- gladde stof versus ruwe stof & spore lijne</i> <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl: <i>+ - sealnaad versluit</i> <i>- almetri per versluit</i> <i>- stippelijnen versluiten</i>
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>3D Nano Facial Protective Mask</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>star buss / Jiangxi</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <i>3 years-</i>

gaat over de maskers.

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>Pu 2 stuks verpakt.</i>
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk, <i>soms lastig.</i> <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>zie vorige blz.</i>
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>- metalen clip aan buitenzijde - Rondwarpen afwijking vele maskers (niet allemaal)</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>KN95 GB2626-2006.</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <i>in wit gaas</i> <input checked="" type="checkbox"/> 2 <i>gaas</i> <input checked="" type="checkbox"/> 3 <i>gaas</i> <input checked="" type="checkbox"/> 4 <i>vilt</i> <input checked="" type="checkbox"/> 5 <i>witte wilton</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input checked="" type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <i>laten soms gemakkelijk los.</i> <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht? <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest <input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Fit is onvoldoende. Daarbij is aangegeven dat o.a.:

- verschillende soorten maskers in 1 doos.
- opdruk verschillend.
- stof verschillend
- slappe neusbeugel en (kant)log.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e

Datum: 1-5-20

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer: ~~693~~ 693

Aantal pallets | 10

Totaal stuks | 57.600

Aantal samples | 48

Totaal aantal na samples | 57552

Aantal per pallet | 6336

Aantal per doos | 576

Aantal per verpakkingseenheid | 16

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer: 958

Inkooporder nummer 301436

LCH-nummer

3057-23160^{JE1}-0205

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

3D nano mask

Locatie:

5.1.2h

ingeboekt door:

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

version 3.1 - 22/05/13 model IRU

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingetragten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

Exemplar voor / geadresseerde / Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)		LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT / VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT / FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		CMR	AVC	25	Code transporteur / Vervoerderscode / Code Frachtführer	No / Nr
1		Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) MOL Logistics (Netherlands) B.V. Care of: Halma Solutions BV Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands		Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.		NL		
2		Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land) Centraal Boekhuis Laanakkerweg 14 4131 PB Vianen The Netherlands		16		Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands		
3		Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land) Laanakkerweg 14 4131 PB Vianen NL		17		Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)		
4		Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) THE NETHERLANDS 1/05/20		18		Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers		
5		Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefugte Dokumente				Dossier: 430/319413 Ref: REF 3057-23160		
6	7	8	9	10	11	12		
Marques et numéros / Merken en nummers / Kennzeichen und Nummern	Nombre de colis / Aantal coil / Anzahl der Packstücke	Mode d'emballage / Wijze van verpakking / Art der Verpackung	Nature de la marchandise / Aard der goederen / Bezeichnung des Gutes	No statistique / Statistisch nummer / Statistieknummer	Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg	Cubage m3 / Volume in m3 / Umfang in m3		
784-13666310 TCG2004891AE	150	CTNS			1470,000	15,42		
13		Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1).		19		Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.: MOL Logistics Netherlands 5.1.2e		
14		Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen <input checked="" type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet franco / Unfrei		20		Arrivée heure / Aankomsttijd / Ankomstzeit Départ heure / Vertrektijd / Abfahrtszeit Total heure / Totaaltijd / Gesamtzeit		
21		Etablie à / Opgemaakt te / Ausgefertigt in Luchthaven Schiphol 1/05/20		15		Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung		
22		5.1.2e Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders		23		Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers		
24		5.1.2e Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers		24		Lieu / Ort 5.1.2e		

v 16:31