

### Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	12-5-2020
Inkoopnummer	304095
Lotnummer	037
Leverancier	Halma
Productnaam of naam fabrikant	zwehuss
Productiedatum	22-4-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2 / 958

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	99%	P2
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<10	55
Testpersoon 2	<10	10
Testpersoon 3	12	11
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			=
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
950	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen: afkeur op fit		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	ja	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

\* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

## Particle Penetration by Kalibra

Datum	12 mei 2020
Inkoopnummer	301935
LOT/X-nummer	037

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	100%	pass P3	100%	pass P3
Masker 2	99%	pass P3	100%	pass P3
Masker 3	99%	pass P3	100%	pass P3
<b>Totaal gemiddelde</b>	99%	pass P3	100%	pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	134	< 240 Pa	pass
Masker 2	141		pass
Masker 3	125		pass

**Eindoordeel > 0,3**

voldoet aan P3

**Eindoordeel > 0,5**

Voldoet aan P3


## Fittest by RIVM

Datum	12-5-20
LOT/X-nummer	LOT 037

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Doos 1  
Doos 2

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 5.1.2e	lekt bij kin/hens	20		55
2. 5.1.2e		510		18
3. 5.1.2e		12		11
4. _____				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending? (ja) (nee)				nee
			Is één clip voldoende?	Ja

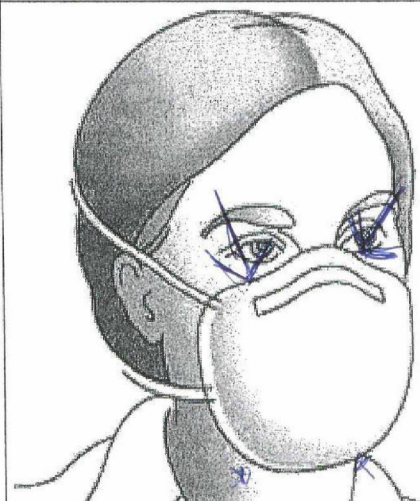

lekt op neus  
lekt bij ogen  
← staat "open" na "up & down"

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)

Type FFP Masker	
Fit test (FAIL of PASS)	

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	837.
Datum uitvoering check	12-5-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Halma		
Productnaam of naam fabrikant	3D Nano Faciel mask (Jfervbus)		
Productiedatum	27-4-2020.		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		
<b>Advies:</b>			
Type masker bij uitgifte:			
afheurp fit			

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Behelnde status.	

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	
--------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	16.
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	3D nano Facial protective mask.
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Hu status technology group.
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

**Bijzonderheden:**

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

**Bijzonderheden:**

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker:  KN 95 GB2626-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 à 6
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof → slap. <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

## Bijzonderheden:

- "cude" elastieken
- alles heeft groverand.

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden:**

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e Datum: 11-5  
 Aantal inkooporder/pakbon \_\_\_\_\_ Lotnummer 837

Aantal pallets	<u>9</u>
Totaal stuks	<u>57024</u>
Aantal samples	<u>48</u>
Totaal aantal na samples	<u>56976</u>
Aantal per pallet	<u>6336</u>
Aantal per doos	<u>576</u>
Aantal per verpakkingseenheid	<u>16</u>

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon JA / NEE

Zo niet Telling bevestigd door Naam: \_\_\_\_\_  
 Paraaf: \_\_\_\_\_

Artikelnummer: 958 Inkooporder nummer 301995

LCH-nummer 3057-2316a-STA0511

Kwaliteitscontrole RIVM JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie: \_\_\_\_\_ ingeboekt door:

5.1.2h

4

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

version 3.1 22/05/13 model IRU

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett getruckten Linien ergrünnten Räumchen müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

Exemple pour / Exemplaer voor / Exemplar für 5.1.2e <b>Logistics (Netherlands) B.V.</b> Care of: Halma Solutions BV Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands		LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		CMR	AVC	25 Code transporteur / Vervoerderscode / Code Frachtführer No Nr	
1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Absender (Name, Anschrift, Land)		16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land)		Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.			
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land)		17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)		5.1.2e			
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)		4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)		18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers 339371			
5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente		6 Marques et numéros / Merken en nummers Kennzeichen und Nummern		7 Nombre de colis / Aantal coli Anzahl der Packstücke		8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung	
157-26341092 TCG2004832AE		100 CTNS Face Mask		9 Nature de la marchandise / Aart der goederen Beschreibung des Gutes		11 Poids brut (kg) / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg	
THE NETHERLANDS 1/05/20		12 Cubage m <sup>3</sup> / Volume in m <sup>3</sup> Umfang in m <sup>3</sup>		10 No stratège / Stratiefisch nummer / Stablnummer		750,000 10,23	
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders		14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen <input type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet franco / Unfrei		15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung		19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.: 5.1.2e <b>Logistics Netherlands</b> 5.1.2e	
The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1). Dpl		20		Arrivée heure / Aankomsttijd Ankomstzeit		Depart heure / Vertrektijd Abfahrtszeit	
21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in		22 Luchthaven Schiphol 1/05/20		23		24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen Gut empfangen	
5.1.2e <b>Logistics B.V.</b> Care of: Halma Solutions B Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schip The Netherlands		5.1.2e Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthave The Netherlands		5.1.2e		11-05-20	
Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders		Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers		5.1.2e		5.1.2e	



170g cat

PX Europeal Return  
 Europeal Return

LEVERANCIER: HALMA SOLUTIONS  
 PRODUCT CODE: X016 JELLE  
 VERPLICHTINGENNUMMER: 3057-23160  
 QUANTITY IN PIECES: 57600 PCS  
 QUANTITY IN CARTON: 100 CTNS

11 MAY '20 15:28

D