

Eindbeoordelingsformulier

Datum	7-9
Inkoopnummer	
Lotnummer	X038
Leverancier	
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	
Type mondkap (volgens de fabrikant)	

	+	+/-	-
Oordeel RVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

	Testgemiddelde
Particle Penetration	
Algemene bevindingen: 99.9% 8	

	FF Pass Level	
	Zonder clip	Met clip
Test 1	164	
Test 2	145	
Gemiddelde 3	10 (niet gesloten)	
FFP2 (Ja/Nee)		

Versturen (JA/NEEN/ONHOLD)	aankopen!	FFP3	zoveel mogelijk aankopen.
Artikelnummer VWS:			
Algemene bevindingen:			

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	X038.
Datum uitvoering check	7-4-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	Te yin JTYA-11 FFP2 NR D		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		
Advies: aanhopen. Type masker bij uitgifte: FFP3			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	goed masker, FFP3
--------------------------	-------------------

BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	2	
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☐ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:	
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?		
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☒ Ja → <i>cp mashe</i> ☐ Nee	
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☒ EN 149 (FFP) → <i>cp mashe</i> - ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐ GB2626-2006 ☐ Anders:.... ☐ Geen	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☐ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt	
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☐ Ja	☐ Nee ☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	☐ Ja	☐ Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? ☐ Ja ☒ Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? ☐ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? ☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? ☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? ☐ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: JTY A-11 FFP2 NR D EN 149:2001 + A1:2009 CE 0158.
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? ☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? ☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Is de stof is non woven? ☒ Ja ☐ Nee
5	Aantal lagen van het masker: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
6	Heeft het masker een nare geur? ☐ Ja ☐ Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? ☒ Met hoofdbanden ☐ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? ☐ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☒ Genaaid ☐ Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? ☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk ☐ Metaal in de stof ☒ Metaal aan de buitenlant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐

* 6

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☒ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☒ Niet ☐ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☒ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:

Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	NA	LOT-nummer	X030
Datum	07/04/2020		
Productnaam	Te Xin		
Leverancier	5.1.2e		
Type mondmasker	FFS2		

	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	99,9	pass P3	100	pass P3
Masker 2	99,9	pass P3	99,9	pass P3
Masker 3	99,8	pass P3	99,8	pass P3
Totaal gemiddelde	99,9	pass P3	99,9	pass P3

Eindoordeel > 0,3	
voldoet aan P3	
Eindoordeel > 0,5	
voldoet aan P3	DELE

Fittest by RIVM

Inkoopnummer		LOT nummer	X 038
Datum	7/4/20		
Productnaam			
Leverancier	5.1.2e		
Type mondmasker			

FF Pass Level	100		
FFP2 (JA/NEEN)	OK	5.1.2e	

Gebruiker:	Score		
	Zonder clip	Met clip	
Per	164		
5.1.2e	185 Gekst met knop		
	10		niet glad genoeg! gesloten

Opmerkingen		
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	zit lekker zit perfect	
Verschuift bij Up & Down/Bending?	niet/nauwelijks. niet	
Is één clip voldoende?	nvt.	
Overige		