

Instructie bij op- en afzetten van FFP2, KN95, N95 masker: **Let op de juiste fit**

5.1.2e

Allereerst:

Zorg ervoor dat uw gezicht gladgeschoren is. Adembeschermingsmaskers mogen niet gedragen worden met stoppelbaardjes, baarden rond neus en wangen of andere gezichtsbeharing op de plaats van de aansluiting van het masker op het gezicht.

DESINFECTEER UW HANDEN VOORDAT U HET MASKER PAKT

Open het masker.

Indien het een gevouwen masker betreft:

Voor de beste fit op de neus maakt u de neusbeugel passend door de vouw in de beugel met de vingers af te vlakken.

1

Houd het masker met de vingertoppen bij het neusstuk ondersteboven vast met de elastieken aan de zijkanten.

2

Positioneer het masker onder uw kin met het neusstuk naar boven.

Terwijl u het masker op zijn plaats houdt, plaatst u het eerste elastiek achter het oor.

3

Terwijl u het masker nog steeds stevig op zijn plaats houdt, trekt u het tweede elastiek over het andere oor.

4

Plaats de vingertoppen boven op het metalen neusstuk. Duw met beide handen de neusbeugel aan op uw neus.


Als u de neusbeugel slechts met één hand aandruwt, kan dit leiden tot een minder effectieve afdichting.

5

Pasvorm controle

1. Dek de voorkant van het masker af met beide handen.
2. ADEM KRACHTIG UIT.
3. Indien er lucht rond de neus lekt, past u de neusbeugel aan om het lekken te stoppen. Herhaal de bovenstaande pasvormcontrole.
4. Als er lucht lekt tussen het masker en het gezicht, dan trekt u de elastieken naar achteren langs het hoofd en maakt u ze aan elkaar vast met een clip. (zie verderop in deze instructie) Hiermee wordt het lekken van lucht voorkomen. Herhaal de pasvormcontrole.

5.1.2e

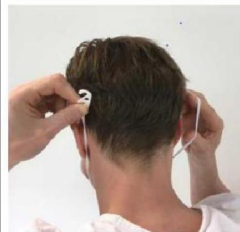

Als u er NIET in slaagt om het masker goed te laten aansluiten, mag u de risicozone NIET betreden. Raadpleeg uw leidinggevende.

6

Afzetten van het masker

5.1.2e




Haal voorzichtig ZONDER HET MASKER AAN TE RAKEN beide elastieken met beide handen van het hoofd.

Gooi het masker weg.

7

Gebruik van de clip om een goede fit op gezicht te bereiken!

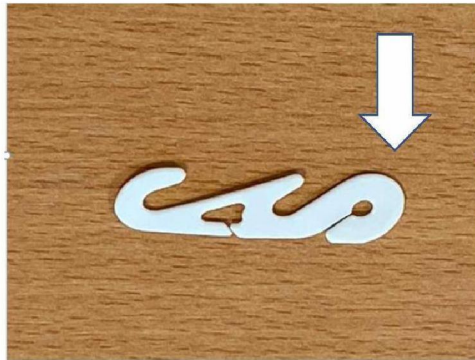

1. Plaats voordat u het masker opzet, één (oor)band in het ronde gat van de clip. (zie pijl)
2. Zet het masker op. Plaats in de nek of op het achterhoofd de tweede (oor)band in de clip. Kies de bevestiging, waarmee het masker de beste fit op het gezicht krijgt. Er is keuze uit drie standen. Zie foto's.



Stand 1: Strak.



Stand 2: Strakker.



Stand 3: Strakst.