

Fittest by RIVM

Datum	1 mei 2020
LOT/X-nummer	X131 (FIOD 1)

Fit factor real time test < 10	☒ Ja, test alleen met Clip	☐ Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. R	Real-time fit < 10		Masker sluit slecht aan en verschuift	14
2. E	Real-time fit < 10			11
3. C	Real-time fit < 10			7
4. 	Zeer slechte fit, dus alleen met Clip testen			
Algemeen: (ruim, krap, etc)	Te ruim			
Verschuift bij Up & Down/Bending?				ja
			Is één clip voldoende?	Nee, slechte fit blijft doordat elastiek te slap is



- neusbeugel sluit niet goed aan en veert terug (slechte vorm vastheid)
- masker schuift over gezicht en blijft slecht zitten
- elastieken zijn te slap om met clip te spannen

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is): → lekkage bij neus en wang !

Type FFP Masker	FFP2
Fit test (FAIL of PASS)	fail

