

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	X135 - FIOD-05
Datum uitvoering check	01-05-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Niet bekend, want in losse transparante zak		
Productnaam of naam fabrikant	Niet bekend. Zie opm. bij leverancier		
Productiedatum	Niet bekend. Zie opm. bij leverancier		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			

Advies:

Type masker bij uitgifte:

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	Masker voldoet qua particle penetration test. Geeft bij > 0,3 µm een rendement van 95%. Fittest voldoet niet aan de norm, zowel met als zonder inzet van de clip. Score minder dan 33 bij alle 3 testers. Elastieken zijn op het masker geniet. Bij nieten door masker heen, geeft gaatjes door masker. Beetje verschillend gesneden bij de
----------------------------	--

	rand van het masker. Sealnaad doorlopend onder neusklem. Geeft scherpe hoek, waardoor extra lekpunt.
--	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? Ca. 20 maskers in transparante zak? Geen binnendoos bij LOT-05. Vraag 2 t/m 9 niet ingevuld.
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW--) <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op <i>binnendoos/plasticzak</i> (shelf life max. 5 jaar) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: Maskers per ca. 20 stuks in zak. Zie vorige bladzijde. Vraag 2 en 3 niet ingevuld.
2	Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER				
1	Algemene indruk masker?	<input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: Masker soms verschillend is gesneden (half door randlijn). Bij nieten meermaals een gaatje aangetroffen.		
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt; geen binnendoos <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:		
3	Wat staat er op het masker:	EN149:2001+A1:2009 FFP2 Made in China KN 95 CE		
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker:	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3
			<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur?	<input type="checkbox"/> Ja		<input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd?	<input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes		
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast?	<input type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input checked="" type="checkbox"/> Vast d.m.v. nieten		
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los		
10	Neusstuk	<input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>		

Bijzonderheden:

De sealnaad van het masker loopt door naar de neusklem. Hierdoor krijg je een vouw van het masker onder de neusklem. Dit leidt nogal gemakkelijk tot een opening bij de neus, vanwege de scherpe hoek van de sealnaad (dus lek).

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Zie fittest resultaten. Masker heeft matige fit. Alle drie testers bij zowel met als zonder clip minder dan 33. Neusbeugel is te slap voor goede fit. Grote kier bij neus (naar binnen kijken). Benauwd door ademweerstand. Elastiek slap.