



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier – FFP1, FFP2 en FFP3 maskers(LOT-nummers)

Datum	20-07-2020
Lotnummer	1999
Leverancier/LCH-nummer	AFPRO Filters
Productnaam of naam fabrikant	FFP@ Mondmaskers
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	100	P3
Masker 2	99	P3
Masker 3	99	P3

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	5	Niet mogelijk
Testpersoon 2	57	Niet mogelijk
Testpersoon 3	Elastiekjes knappen steeds bij het omdoen bij verschillende personen (ook buiten het fittest team). Elastieklenge varieert sterk tussen de maskers.	
<input checked="" type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS		

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
<input type="checkbox"/> 957 (FFP1)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd
<input checked="" type="checkbox"/> 958 (FFP2)	<input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<input type="checkbox"/> 972 (FFP3)	
<p>Algemene bevindingen: Wat ontbreekt is: 'Filtering half mask to protect against COVID-19' (dit moet letterlijk zo vermeld worden), nummer en versie van de RFU, expiratedatum, de zin 'see information supplied by the manufacturer', bewaarcondities. Masker: wat ontbreekt is: het bedoelde gebruik, dit mag alleen aangeduid worden als 'COVID-19', het nummer en de versie van de RFU. Dit is een verplichting vanuit RFU 02.075_02_Regulation (zie paragraaf 4.1). Documentatie/testrapporten ontbreken.</p> <p>Vermelding 'geproduceerd voor het landelijk consortium hulpmiddelen'. Bijzonder dat bij ontwerp voor model KN95 gekozen is. Elastieken laten snel los bij opzetten masker. Eén van de vier punten zit op de rand gestanst. Elastieklenge varieert sterk tussen de maskers.</p>	

Samenvatting Q1 en Q2 alleen voor FFP1 en FFP2 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>94%	>100
Mand 2			>94%	50<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	50<FIT<100
Mand 5	X	Niet mogelijk	>94%	<50
Mand 6			80%<PFE<94%	<50
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020

Inboekrapport VWS

Naam ontvanger

5.1.2e

Datum

16-07-20

Afzender

AFPRG

Lotnummer

1999

Controle & Specificatie

Naam Teller:

5.1.2e

<u>5</u>	x lamga Pallets(s) à	<u>7200</u>	=	<u>36.000</u>		
<u>1</u>	x Rest-pallet		=	<u>4850</u>	aantal per doos =	<u>300</u>
Totaal stuks ontvangen				=	<u>40.850</u>	
					aantal per verpakking=	<u>50</u>
Aantal samples (alleen nieuwe inslag)				=	<u>150</u>	
Totaal aantal na samples				=	<u>40.700</u>	

Verplicht 2e telling

Controle & Specificatie

Naam Teller:

5.1.2e

<u>5</u>	x lamga Pallets(s) à	<u>7200</u>	=	<u>36.000</u>		
<u>1</u>	x Rest-pallet		=	<u>4850</u>	aantal per doos =	<u>300</u>
Totaal stuks ontvangen				=	<u>40.850</u>	
					aantal per verpakking=	<u>50</u>
Aantal samples (alleen nieuwe inslag)				=	<u>150</u>	
Totaal aantal na samples				=	<u>40.700</u>	

Bij telverschil tussen teller 1 en 2 moet de leiding erbij worden geroepen

Artikelnummer:

950

Inkoopnummer:

306435

LCH-nummer

2020-0227-01

Exp Date

07/2023

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD /

AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Inboekrapport VWS

Naam ontvanger

5.1.2e

Datum

16.07.20

Afzender

AFPRG

Lotnummer

1999

Controle & Specificatie

Naam Teller:

5.1.2e

<u>5</u> x lamga Pallets(s) à	<u>7200</u>	=	<u>36.000</u>	aantal per doos =	<u>300</u>
<u>1</u> x Rest-pallet		=	<u>4850</u>		
Totaal stuks ontvangen		=	<u>40.850</u>	aantal per verpakking=	<u>50</u>
Aantal samples (alleen nieuwe inslag)		=	<u>150</u>		
Totaal aantal na samples		=	<u>40.700</u>		

Verplicht 2e telling

Controle & Specificatie

Naam Teller:

5.1.2e

<u>5</u> x lamga Pallets(s) à	<u>7200</u>	=	<u>36.000</u>	aantal per doos =	<u>300</u>
<u>1</u> x Rest-pallet		=	<u>4850</u>		
Totaal stuks ontvangen		=	<u>40.850</u>	aantal per verpakking=	<u>50</u>
Aantal samples (alleen nieuwe inslag)		=	<u>150</u>		
Totaal aantal na samples		=	<u>40.700</u>		

Bij telverschil tussen teller 1 en 2 moet de leiding erbij worden geroepen

Artikelnummer:

950

Inkoopnummer:

306435

LCH-nummer

2020-0227-01

Exp Date

07/2023

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD /

AFGEKEURD

Bijzonderheden: