

Eindbeoordelingsformulier

Overige Medische Hulpmiddelen

Datum	08-06
Lotnummer/X-nummer	1549
Leverancier/LCH inkoper	
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	08-06-2014
Soort hulpmiddel	g40

(indien van toepassing)	
Naam test	waterdom
Uitslag test	pas

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen: Geen documentatie, geen info.			

Eindbeoordeling

Artikelnummer VWS	Quality Check:
g40	<input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afkeur
Algemene bevindingen:	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Beoordelingsformulier - Waterkolom

Datum	08/06/2020
Inkoopnummer (indien bekend)	303723
LOT-nummer of X-nummer	1549 1549
Productsoort	Wolfram school

Indicatieve druppel test jas

PASS

FAIL

Indicatieve naadlekkage test jas:

PASS

FAIL, plek van de naadlekkage..... *nat*

Waterkolomtest

Er worden twee jassen getest, deze worden elk in drie stroken geknipt en gemeten.

Meting	Resultaat > 18 cmH2O
1	710
2	710
3	710
4	710
5	710
6	710
Gemiddelde	710
Standaarddeviatie	

Uitslag waterkolomtest

PASS

FAIL

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole jassen

Lotnummer	1549
Leverancier	onbekend
Productnaam	onbekend
Datum	2-6-2020
Besproken met RIVM	<input type="checkbox"/>
Advies: Type projectieschort bij uitgifte: halteschort.	

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De testpersonen beoordelen op binnendoos en/of direct omsluitende verpakking op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het schort zelf wordt gecontroleerd op kwaliteit, materiaal, sluitingen en pasvorm. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit schort zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel testpersonen	'is een schort ! materiaal?'
----------------------	---------------------------------

BINNENDOOS	
1	Aantal schorten per binnendoos? <i>50</i>
2	Algemene indruk binnendoos? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos? <i>nut</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos? <i>nut</i>
5	Staat een CE merk op de doos? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos? <input type="checkbox"/> NEN-EN 13795 <input type="checkbox"/> 89/686/EEG <input type="checkbox"/> NEN-EN 14126 <input checked="" type="checkbox"/> <i>geen</i>
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input checked="" type="checkbox"/> <i>nee</i>
8	Heeft de instructie betrekking op het schort in de doos? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> <i>nee</i> <input type="checkbox"/> Nee
9	Staat er een expiratie datum op <i>binnendoos</i> ? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET SCHORT		
1	Zit er verpakking om het schort?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	<i>50 in 1 zak</i>
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>nvt</i>

Bijzonderheden:

LCH&MS use only

HET SCHORT		
1	Algemene indruk schort?	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het schort overeen met de foto op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>nut</i>
3	Wat staat er op het schort:	<i>nik</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het schort staat?	<i>nut</i>
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	<i>nut</i>
4	Waar is het materiaal van gemaakt?	<input type="checkbox"/> Non-Woven SMS <input type="checkbox"/> Non-Woven SMMS <input type="checkbox"/> Polyethyleen <input type="checkbox"/> ?
5	Heeft het schort een nare geur?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Heeft het schort lange mouwen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Worden de mouwen afgesloten met een elastisch manchet?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
8	Sluit het schort ook de rug af?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
9	Tot welke hoogte is het schort?	<input type="checkbox"/> Boven knie <input checked="" type="checkbox"/> Tot aan knie <input type="checkbox"/> Tot aan enkels <input type="checkbox"/> Overall <input type="checkbox"/>
10	Hoe wordt schort bevestigd?	<input type="checkbox"/> Striksluiting nek <input checked="" type="checkbox"/> Striksluiting taille <input type="checkbox"/> Haltersluiting nek <input type="checkbox"/> Ritssluiting <input type="checkbox"/>
11	Hoe zitten de sluitingen aan het schort vast?	<input type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input checked="" type="checkbox"/> <i>aan 1 stuk</i>
12	Wat is de kwaliteit van de sluitingen?	<input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input checked="" type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Pasvorm schort		
1	Hoe past het schort?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Te strak <input type="checkbox"/> Te ruim <input type="checkbox"/> Niet sluitend <input type="checkbox"/>
2	Waar past het schort niet/slecht	<input type="checkbox"/> Armen <input type="checkbox"/> Benen <input type="checkbox"/> Romp voorkant <input type="checkbox"/> Romp achterkant <input checked="" type="checkbox"/> <i>is een schort!</i>
3	Kan het schort met de sluitingen strakker worden getrokken?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
4	Wat gebeurt er bij bewegingen?	<input checked="" type="checkbox"/> Schort blijft goed zitten <input type="checkbox"/> Schort opent of scheurt <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Mogelijke testen				
Test	Norm	Minimale eis		Resultaat
Microbial penetration wet	NEN-EN-ISO 13795-1			
Cleanliness microbial/Bioburden	NEN-EN-ISO 13795-1	≤300 CFU 100cm ²		
Liquid penetration	NEN-EN-ISO 13795-1	≥20 cm H ₂ O		
Bursting strength dry	NEN-EN-ISO 13795-1	≥40 kPa		
Bursting strength wet	NEN-EN-ISO 13795-1	≥40 kPa		
Tensile strength dry	NEN-EN-ISO 13795-1	≥20 N		
Tensile strength wet	NEN-EN-ISO 13795-1	≥20 N		
Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols	NEN-EN 14126	Class	Penetration ratio (log)	
		3	Log > 5	
		2	3 < log ≤ 5	
		1	1 < log ≤ 3	
bacteriële doordringing van vocht	NEN-ISO 22610			

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Inboekrapport VWS

Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

08-06-20

Inkooporder/pakbon

Lotnummer

1549

Aantal pallets

5.1.1c

Totaal stuks

25000

Aantal samples

5.1.1c

Totaal aantal na samples

24850

Aantal per pallet
 Aantal per doos
 Aantal per verpakkingseenheid

5.1.1c

Ook overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Telling bevestigd door

Naam:

.....

Paraaf:

.....

Nummer:

9412

Inkooporder nummer

328723

Nummer

2020-0173-05

Rijkscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Opmerkingen:

Ingeboekt door:

5.1.2h

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

08-06-20

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

1549

Aantal pallets

5.1.1c

Totaal stuks

25000

Aantal samples

5.1.1c

Totaal aantal na samples

24850

Aantal per pallet

Aantal per doos

Aantal per verpakkingseenheid

5.1.1c

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

.....

Paraaf:

.....

Artikelnummer:

940

Inkooporder nummer

303723

LCH-nummer

2020-0173-05

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

5.1.2h

ingeboekt door:



oerlemans plastics BV
VERPAKKINGEN EN FOLIE

Factuur naar:
Mediq Nederland B.V.
Afdeling Accounts Payable
Postbus 2066

3500 GB Utrecht

Levering aan:

5.1.2h

Tel-nr. lev.adres:

Uw faxnr: 0186-616893

PAKBON:
306595

Datum 05.06.2020

Uw order
Klant nr.
Ordernr.
Nr.

100383
433554
LCH2020-0173-05

Blz 1/1

pos.	Artikelnr/-omschrijving	Lev.Hv.	PE
------	-------------------------	---------	----

1	V0800-1250-045-0000 OPH Nursery Apron Stat. nr: 39232100 Afmeting: 1.250 x 800 mm Dikte 0,045 mm Blauw Aantal_per_bundel 5.1.1c Aantal_in_doos 5.1.1c	5.1.1c	stuk
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------

Verpakkingstype

Doos

Verzendtype
Levervoorwaarden

Eigen vervoer
CIP Nederland bij goederenwaarde boven Eur. 5.1.1c gebaseerd op
Incoterms 2020

Euro ISPM15 800x1200mm 1 X
Colli
Lostijden

5.1.1c stuks
5.1.1c stuks
7.00 - 18.00 uur

8 JUN'20 10:38



5.1.1c

lece pallets retour



IEN
0 26000

5.1.2e

Oerlemans Plastics B.V.
Kleibergestraat 4
4265 GB Genderen Nederland
+31 416 35 81 00
info@oerlemansplastics.nl
www.oerlemansplastics.nl

Bank ABN AMRO
IBAN 5.1.5
BIC/Swift 5.1.5
BTW 5.1.5
K.v.K. 18114254

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de NRK Folie 2017, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag en ingeschreven onder nummer 40/2017 en gepubliceerd op onze website www.oerlemansplastics.nl, z.o.z.