

126

Eindbeoordelingsformulier

Datum	2-4-2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	126
Leverancier	
Productnaam of naam fabrikant	KN95 huisineer. 11120082
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

	+	+/-	-	Voornaam beoordelaar
Oordeel RIVM	+			5.1.2e
Oordeel AH/TOXI	+			
Algemene bevindingen:				

	Testgemiddelde	Voornaam beoordelaar
Particle Penetration		
Algemene bevindingen: <u>FFP1</u> geen FFP2.		

	FF Pass Level		FFP2 (JA/NEEN)	Voornaam beoordelaar
	Zonder clip	Met clip		
Zonder clip 1	30	175	Ja met clip.	
Met clip 2	20	35		
Gemiddelde				

Versturen? (JA/NEEN)	alleen met clip en instructie. ^{uitgeven} _{als} <u>FFP1</u>
Artikelnummer VWS:	
Algemene bevindingen:	

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	126
Datum	2-4-2020		
Leverancier	Tangcheng Huimei Protective Products		
Productnaam/naam fabrikant	Huimei KN95 - HM-2002		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM	5.1.2e		
Advies: Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	FFPI. → wel met clip en in ^{huid} → op basis van fit en filtratie
----------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 10
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <u>KN95</u>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? Tongcheng Huimei Protective Products Co., Ltd.
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <u>verpakking</u> <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KINGS Huismei GB2626-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input checked="" type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input checked="" type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Particle Penetration > 0,3 McronDatum: ~~04~~ 02/04/2020

Inkoopnummer	NA
Lotnummer	126
Productnaam	NA
Leverancier	Huisine
Type mondkmasker	KN-95

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	92,6%	Pass for P1
Masker 2	91,7%	Pass for P1
Masker 3	92,6%	Pass for P1
Totaal gemiddelde	92,3%	Pass for P1

Eindoordeel (P1/P2/P3)
<p>Voldeet voor P1</p>

5.1.2e

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e Datum: 01-04-2000
 Artikelnummer: _____ Lotnummer 126
 Inkooporder nummer _____
 Aantal inkooporder/pakbon _____

Aantal pallets 2
 Totaal stuks 30.000

Aantal per pallet 1x 16.000 1x 14.000
 Aantal per doos 2000
 Aantal per verpakkingseenheid 10

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon **JA / NEE**

Zo niet Telling bevestigd door Naam: _____
 Paraaf: _____

Aantal afgehaald voor controle 30
 Verpakt per 10

Kwaliteitscontrole RIVM **JA / NEE**

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 1 april 2020 14:01
Pakbon

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

DEZE ZENDING IS VOOR HET
LANDELIJKE VERZAMELPUMP
VOOR MONDMASKERS VAN
HET MINISTERIE VAN VWS.
GEZIEN DE NOOD WILLEN WIJ
U VRAGEN DEZE ZENDEN MET
VOORRANG TE BEHANDELEN.
VOOR VRAGEN KUNT U
CONTACT OPNEMEN MET

5.1.2e

5.1.2e VAN O2HEALH OP

06- 5.1.2e OF 5.1.2e

5.1.2e VAN VWS OP

06- 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Fittest norm = 100

Datum:

Inkoopnummer	
Lotnummer	126
Productnaam	
Leverancier	
Type mondkmasker	

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

		Score	
Gebruiker:		Zonder clip:	Met clip: <i>exhalang!</i>
	5.1.2e	30	175
		20	35

Opmerkingen tijdens gebruik:

	Met clip	Zonder clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)		<i>blijft redelijk zitter bij 'primair'</i>
Verschuift bij Up & Down / Bending?		<i>naauwelijks</i>
Is één clip voldoende?		
Overige:		