

Loodsrapport van

5.1.2h

Inslag Nr.: **87350**Dossier Nr.: **66858**Datum: **23-03-2020**

Klant: ERASMUS MEDISCH CENTRUM

Autonr.: V-815-SF /

Referentie: DHL 23-03

Goederen omschrijving: MONDKAPJES FFP 2

Aantal colli: 250 PCS

Aantal pallets: Hoeveelheid per pallet: -

Bruto gewicht: 0 KG

Containers:

Staat van de goederen:

Aantal stuks met schade:

Schade:

Lot nr.: _____

Hout / Plastic / Euro pallet : _____

Prod. Datum: _____

Gelost door: _____

T.H.T. _____

Geteld door: _____

Palletfactor _____

Overige opmerkingen:

Gelost in vak/loods/stelling:

Opmerkingen voordat er gelost gaat worden:

ATTENTIE CHAUFFEURS:VOOR AANVANG VAN HET LOSSEN AAN DE RAMPEN 1 T/M 4
EERST EEN WIELKEG VOOR DE WIELEN LEGGEN !!!!!!!!!!!!!!!

5.1.2h

5.1.2h

[illegible]

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer	87350
Leverancier	Kolmi
Productnaam	OP AIR PRO FFP2 NRD
Datum	23-02-2020
Naam	5.1.2e
Functie	5.1.2e 5.1.2e
Besproken met RIVM	5.1.2e 5.1.2e
Advies: Goedgekeurd Type masker bij uitgifte: FFP2 + Chirurgisch type IIR	

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	
--------------------------	--

	BINNENDOOS	
1	Aantal maskers per binnendoos?	50
2	Algemene indruk binnendoos? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos?	Kolmi OPAIRPRO
4	Welke leverancier staat op de binnendoos?	Milkon
5	Staat een CE merk op de doos?	☒ Ja ☐ Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos?	☒ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☒ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☐ Staat op de doos ☒ Los in de doos ☐
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos?	☒ Ja ☐ Nee
9	Staat er een expiratie datum op <i>binnendoos</i> (shelf life max. 5 jaar)	☒ Ja ☐ Nee

Bijzonderheden:

	VERPAKKING OM HET MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☐ Ja	☒ Nee
	Zo ja:		
2	Hoe is de verpakking te openen?	☒ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☒ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:	

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? ☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto op de binnendoos? ☒ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: 2025-02 602 2002120446 Kolmi Op-Air Oxygen REF: M522010-WH CE en EN En type FFP2 NRD Type IIR
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? ☒ Ja ☐ Nee
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? ☒ Ja ☐ Nee
4	Is de stof is non woven? ☒ Ja ☐ Nee
5	Aantal lagen van het masker: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
6	Heeft het masker een nare geur? ☐ Ja ☒ Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? ☒ Met hoofdbanden ☐ Met oor elastieken ☐
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? ☐ Erop gestanst ☒ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? ☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk aan de binnenzijde? ☒ Metaal ☒ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☒ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen
2	Waar ontsnapt lucht bij de leakttest	☒ Niet ☐ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t.
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☒ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:







