

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer	07361 Rose	
Leverancier	Comforties	
Productnaam	comforties face mask.	
Datum	25-3-2020	
Naam	5.1.2e	5.1.2e
Functie		
Besproken met RIVM	5.1.2e	5.1.2e
Advies:		
Type masker bij uitgifte:	Chirurgisch mondkapje type II R, spat bestendig	

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nee
Oordeel van RIVM	Aanvaard. type II R.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	Chirurgisch masker II R
--------------------------	-------------------------

BINNENDOOS		
1	Aantal maskers per binnendoos?	50
2	Algemene indruk binnendoos? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos?	Comforties face masks
4	Welke leverancier staat op de binnendoos?	Comforties
5	Staat een CE merk op de doos?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input checked="" type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) type II R <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> REF 8700
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> nee
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee nvt
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos (shelf life max. 5 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee 2024-05

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker? Zo ja:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee <i>onvt</i>
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input type="radio"/> Gemakkelijk <input type="radio"/> Lastig <input type="radio"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER		
1	Algemene indruk masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto op de binnendoos?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>o nvt (geen foto) wel pictogram.</i>
3	Wat staat er op het masker:	<i>Comforties</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat?	<i>JA nvt</i>
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	<i>ja</i>
4	Is de stof is non woven?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd?	<input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/>
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast?	<input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/>
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk aan de binnenzijde?	<input type="checkbox"/> Metaal <input checked="" type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="radio"/> Goed <input type="radio"/> Ruimte bij de kin <input type="radio"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="radio"/> Slechte aansluiting bij wangen
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="radio"/> Niet <input type="radio"/> Neus <input type="radio"/> Kin <input type="radio"/> Zijkant
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee <i>banden zijn vrij lang.</i>
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="radio"/> Masker blijft op zijn plek <input type="radio"/> Masker verschuift <input type="radio"/>

Bijzonderheden:

Banden vrij lang.





