

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer of Gift-nummer	39319	Lotnummer: 30
Leverancier	Care & Advice	
Productnaam	Masque Élastiques THF Type II	
Datum	27 maart 2020	
Naam	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	
Functie	☒ AH ☐ Toxio	
Besproken met RIVM	5.1.2e 5.1.2e	
Advies: Type masker bij uitgifte: Chirurgisch type II		

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	Chirurgisch masker type II (geen IIR)
--------------------------	---------------------------------------

BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	60	
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:	
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	Masque Élastiques THF Type II 3 Plis	
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Care & Advice	
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☒ Ja ☐ Nee	
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☐ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☒ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐ Anders:.... ☐ Geen	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☐ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☒ Ontbreekt	
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☐ Ja	☐ Nee
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	☒ Ja 01/2025	☐ Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER			
1	Zit er verpakking om het masker?	☐ Ja	☒ Nee
	Zo ja:		
2	Hoe is de verpakking te openen?	☐ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:	

Bijzonderheden:

HET MASKER				
1	Algemene indruk masker?	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:		
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos?	☒ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:		
3	Wat staat er op het masker:	CA Diffusion		
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat?	☐ Ja	☒ Nee	☐ N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	☐ Ja	☒ Nee	☐ N.v.t.
4	Is de stof is non woven?	☒ Ja		☐ Nee
5	Aantal lagen van het masker:	☐ 1	☐ 2	☒ 3
			☐ 4	☐ 5
6	Heeft het masker een nare geur?	☐ Ja		☒ Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd?	☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes		
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast?	☐ Erop gestanst ☒ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.		
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken?	☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los		
10	Neusstuk	☒ Mentaal in de stof ☐ Mentaal aan de buitenlant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐		

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☒ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leakttest	☐ Niet ☐ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☒ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☒ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:







