

## Eindbeoordelingsformulier

Datum	01-06-2020
Inkoopnummer	30052
Lotnummer	363
Leverancier	
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	02-10-01-2020
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	UN95 971/98 FFP2

	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen:	Materiaal voldoet wel aan P2 qua penetratie. Fittest is onder de maat. Verder ontbreekt elke leesbare documentatie		

	Testgemiddelde	
Particle Penetration	>0,3: 96,1%	>0,5: 99%
Algemene bevindingen:	Voldoet als FFP2	

	FF Pass Level	
	Zonder clip	Met clip
Test 1	16	30
Test 2	3,4	9
Gemiddelde		
FFP2 (Ja/Nee)	Nee; beide tests voldoen niet aan 33	

Waterkolom	Gemiddelde	Standaarddeviatie

Spattest	<input type="checkbox"/> PASS	<input type="checkbox"/> FAIL
----------	-------------------------------	-------------------------------

Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD)	in P1 (957)
	Voldoet niet als P2 vanwege slechte fittest
Artikelnummer VWS:	
Algemene bevindingen:	

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	300052	LOT-nummer	363
Datum uitvoering check	9/4/2020		
Leveringsdatum	-		
Leverancier	?		
Productnaam of naam fabrikant	KING'S Haze Proof Mask		
Productiedatum	10-01-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
<b>Advies:</b> Type masker bij uitgifte:			

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Afhew. VB	

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	Materiaal voldoet wel aan P2 kwaliteit op penetratietest. Fit test is onder de maat. Leesbare documentatie ontbreekt (alles in chinees)
----------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>10</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>KN95</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>? Chinesees</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos ; <i>chinesees tekst</i> <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <i>niet leesbaar chinesees</i>

## Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>rolledog transparant</i>
2	Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input checked="" type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>nvt</i>

## Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: <i>KN 95 GB 2626-2006 Chinese Fclass</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <i>in wit PP wit meltblauw dun grasje meltblauw</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input checked="" type="checkbox"/> <i>foam binnenzijde bij neusstuk strip</i>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht? <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Goed</li> <li><input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken</li> <li><input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen</li> <li><input type="checkbox"/></li> </ul>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Niet</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Neus</li> <li><input type="checkbox"/> Kin</li> <li><input type="checkbox"/> Zijkant</li> <li><input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)</li> </ul>
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ja</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Nee</li> <li><input type="checkbox"/> N.v.t.</li> </ul>
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <i>omhoog</i></li> <li><input type="checkbox"/></li> </ul>

*zie effect*

Bijzonderheden:

## Fittest by RIVM

Inkoopnummer		LOT nummer	Lot 363
Datum			
Productnaam			
Leverancier			
Type mondmasker			

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

Gebruiker:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	16	30
	3.4	9

Opmerkingen		
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	te groot, veel te ruim	Trekt ader oor sluit goed aan groot (naam:)
Verschuift bij Up & Down/Bending?	Nee	Nee Ja (naam:)
Is één clip voldoende?		Ja
Overige		

## Particle Penetration by 5.1.2e

Inkoopnummer		LOT-nummer	363
Datum	09 apr 2020		
Productnaam			
Leverancier			
Type mondk masker	KN-95 / 0958		

	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	97,4	P2	99,2	P3
Masker 2	95,8	P2	98,8	P2
Masker 3	95,1	P2	98,8	P2
<b>Totaal gemiddelde</b>	<b>96,1 %</b>	<b>P2</b>	<b>99,0</b>	<b>P2</b>

Eindoordeel  $\geq 0,3 \mu\text{m}$

pass for P2

Eindoordeel  $\geq 0,5 \mu\text{m}$

pass for P2

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

8-4-2020

Artikelnummer:

971

Lotnummer

363

Inkooporder nummer

300052

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

4

Totaal stuks

24490

Aantal per pallet

7000

Aantal per doos

700

Aantal per verpakkingseenheid

10

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle

30

Verpakt per

10

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Los Ref 3057 233355