

Eindbeoordelingsformulier

Datum	
Inkoopnummer	
Lotnummer	2026
Leverancier	UMC Wreem
Productnaam of naam fabrikant	Surgical mask Sun gical
Productiedatum	
Type mondkap (volgens de fabrikant)	Surgical mask, adult type

	+	+/-	-
Oordeel RIVM		+/-	
Oordeel AH/TOXI		+/-	
Algemene bevindingen:			

	Testgemiddelde
Particle Penetration	
Algemene bevindingen:	

	FF Pass Level	
	Zonder clip	Met clip
Test 1		
Test 2		
Gemiddelde		
FFP2 (Ja/Nee)		

Waterkolom	Gemiddelde	Standaarddeviatie
	62	3

Spattest	☐ PASS ☒ FAIL
----------	--

Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD)
advies: type I waarschijnlijk. <u>Niet</u> wijst op II CR
Artikelnummer VWS:
Algemene bevindingen:

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	2026
Datum uitvoering check	7-4-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	Sanjiao Oral Health surgical mask		
Productiedatum	26-3-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		
Advies: Type masker bij uitgifte: type I			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	het is waarschijnlijk een type I → komt ook niet aan de waterholentest heen.
--------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?		
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:	
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	Surgical Mask.	
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Sanjiao Health Co.	
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☒ Ja ☐ Nee	
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☐ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☒ EN 14683 (Surgical) → wel norm genoemd ☐ Y 0469-2011 (Surgical) <u>maakt geen type</u> ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐ GB2626-2006 ☐ Anders:.... ☐ Geen	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☐ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☒ Ontbreekt	
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.	
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	☐ Ja ☒ Nee	

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☐ Ja ☒ Nee
	Zo ja:	
2	Hoe is de verpakking te openen?	☐ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? ☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? ☒ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: 
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? ☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? ☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.
4	Is de stof is non woven? ☒ Ja ☐ Nee
5	Aantal lagen van het masker: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
6	Heeft het masker een nare geur? ☐ Ja ☒ Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? ☐ Met hoofdbanden ☐ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? ☐ Erop gestanst ☒ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? ☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk ☒ Metaal in de stof ☐ Metaal aan de buitenlant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☒ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☐ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☒ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☒ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:

Beoordelingsformulier voor de waterkolom en spattest

Datum	7-4-2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	2026
Leverancier	
Productnaam of naam fabrikant	NUMACOM
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	ONBEKEND

Waterkolomtest

Er worden twee maskers getest, deze worden elk in drie stroken geknipt en gemeten.

Meting	Resultaat
1	63
2	60
3	56
4	64
5	63
6	63
Gemiddelde	62
Standaarddeviatie	3

pass = 80 cm H_2O

Spattest

☐ PASS

☒ FAIL